

Hướng dẫn sử dụng Sunimax:

- Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng. Đặt ngón trỏ lên đầu vòi phun
- Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào lỗ mũi, ấn nhanh đầu phun từ 2-3 lần mỗi bên mũi, để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài, hít sạch và lau mũi.
- Lau sạch vòi phun, đậy nắp bảo vệ
- Dùng: ngày 3-6 lần, mỗi lần 1-2 nhát xịt mỗi bên mũi. Có thể dùng tăng nếu thấy cần thiết.
- **Xuất xứ:** Việt Nam.

Lưu ý:

1. Để xa tầm tay trẻ em.
2. Tránh để gần lửa, những nơi ẩm mốc.