

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
NASAH WASH**

(Mã sản phẩm: NEW LIGHT.01)

THÀNH PHẦN

Nano bạc 10 ppm, Sodium Chloride 1,5%, Benzalkonium Chloride, Dexpanthenol, Glycerin, Sodium Hydroxide, Nước R.O vừa đủ.

MỤC ĐÍCH / CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

- Dùng vệ sinh mũi hàng ngày, giúp phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi, làm sạch mũi, loại trừ tạp chất đọng trong mũi, phòng ngừa viêm mũi, ngạt mũi, sổ mũi, cảm cúm, viêm xoang....

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người lớn và trẻ em e từ 6 tháng tuổi, người lớn bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, ngạt mũi, sổ mũi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1: Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng
- 2: Đặt ngón tay trở lên đầu mũi, vòi phun
- 3: Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào mũi
- 4: Ấn nhanh đầu phun từ 2-3 lần mỗi bên mũi (lưu ý xịt vào cánh mũi)
- 5: Để dung dịch dư kéo chất nhờn ra ngoài và lau mũi
- 6: Lau sạch vòi phun, đậy nắp bảo vệ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.
- Trẻ em dùng phải có người lớn hướng dẫn.

BẢO QUẢN

Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2020
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Duy