

Dung dịch vệ sinh mũi

NASAH WASH

Dung dịch vệ sinh mũi

NASAH WASH



Công nghệ Nano Bạc

- Loại bỏ gỉ mũi
- Loại bỏ chất nhầy
- Thông thoáng, dễ thở

NET: 70 ml

Dung dịch vệ sinh mũi

NASAHWASH

THÀNH PHẦN

Nano bạc 10ppm
Sodium Chloride 1,5%
Benzalkonium Chloride
Dexpanthenol
Glycerin
Sodium Hydroxide
Nước R.O vừa đủ

CÔNG DỤNG

Dùng vệ sinh mũi hàng ngày, giúp phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi, làm sạch mũi, loại trừ tạp chất đọng trong mũi, phòng ngừa viêm mũi, ngạt mũi, sổ mũi, cảm cúm, viêm xoang....

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người bị viêm mũi, ngạt mũi, sổ mũi, viêm xoang, cảm cúm

CÁCH DÙNG

- Trẻ em từ 6 tháng - 2 tuổi:
Dùng 1-2 lần / ngày
- Trẻ em trên 2 tuổi:
Dùng 2 - 3 lần / ngày
- Người lớn :
Dùng 3-4 lần / ngày

Dung dịch vệ sinh mũi

NASAH WASH



Công nghệ Nano Bạc

- Loại bỏ gỉ mũi
- Loại bỏ chất nhầy
- Thông thoáng, dễ thở

NET: 70 ml

Dung dịch vệ sinh mũi

NASAHWASH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trẻ em và người lớn:

- 1: Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng
- 2: Đặt ngón tay trở lên đầu mũi, vò phun
- 3: Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào mũi
- 4: Ấn nhanh đầu phun từ 2-3 lần mỗi bên mũi (lưu ý xịt vào cánh mũi)
- 5: Để dung dịch dư kéo chất nhờn ra ngoài và lau mũi
- 6: Lau sạch vòi phun, đẩy nắp bảo vệ


BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng mặt trời

SỐ ĐK:
Lô SX:
NSX:
HSD:

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ NEW LIGHT PHARMA
Địa chỉ: LK 197 - DV 05 tổ 20 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH LD CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý
Địa chỉ: Lô B3 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh Đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

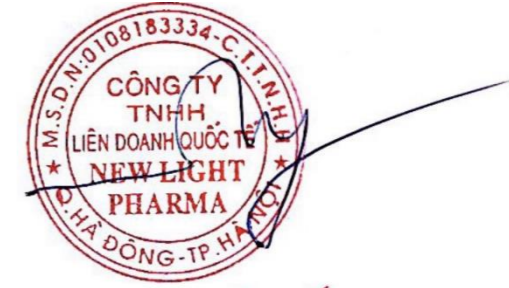

GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Duy