

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
NƯỚC BIỂN SÂU SEA LOVE**

**THÀNH PHẦN:**

Sodium Clorid, Nano Bạc, tinh dầu khuynh diệp , Benzalkonium Clorid, Nước tinh khiết vừa đủ .

**MỤC ĐÍCH/CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:**

- Vệ sinh mũi hàng ngày khi tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm, thời tiết thay đổi, máy lạnh... giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho mũi, tẩy sạch mầm bệnh, để phòng ngừa bệnh hô hấp , viêm mũi, viêm xoang.
- Tác dụng kháng khuẩn, tan chất nhầy, thông mũi nhanh chóng, giúp thở dễ dàng hơn.
- Làm giảm các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng, viêm hô hấp trên, khô khè, khô rát lưỡi họng
- Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh lý về mũi.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

- Dùng tay ấn dứt khoát 3-4 lần mỗi bên mũi . Lau sạch, khô vôi xịt. Đậy nắp sau khi sử dụng.
- Ngày dùng 3-4 lần hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết.
- Sản phẩm an toàn khi sử dụng cho phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ em từ 3 tháng tuổi. Có thể sử dụng lâu dài.

**5. Đối tượng sử dụng :**

- Người lớn và trẻ em trên 3 tháng tuổi.

**Chống chỉ định :**

- Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của dung dịch.

**Bảo quản :**

- Để ở điều kiện thường, nơi khô mát. Để xa tầm với của trẻ em  
**HSD : 36 tháng kể từ ngày sản xuất**

Sản phẩm của : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG  
ƯƠNG INOMEX**

**Địa chỉ:** Số 274 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận  
Thanh Xuân, TP Hà Nội

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE**

Địa chỉ: Số 19, Đường Phúc Hậu, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Hồng Hương*