


**KT:160x48x48**

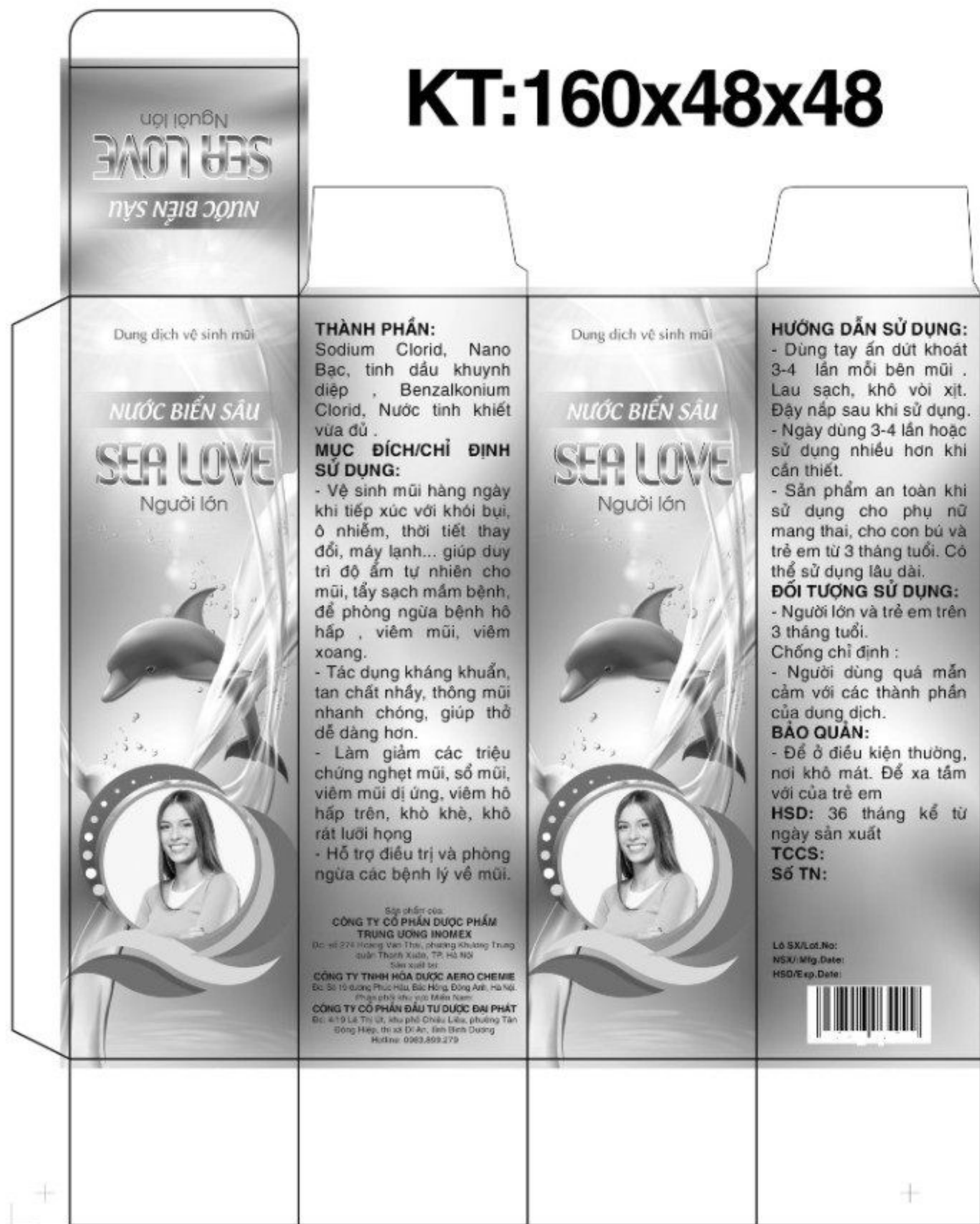

# 105x70mm

**THÀNH PHẦN:**  
Sodium Clorid, Nano Bạc, tinh dầu khuynh diệp, Benzalkonium Clorid, Nước tinh khiết vừa đủ.

**MỤC ĐÍCH/CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:**  
- Vệ sinh mũi hàng ngày khi tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm, thời tiết thay đổi, máy lạnh... giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho mũi, tẩy sạch mầm bệnh, để phòng ngừa bệnh hô hấp, viêm mũi, viêm xoang.  
- Tác dụng kháng khuẩn, tan chất nhầy, thông mũi nhanh chóng, giúp thở dễ dàng hơn.  
- Làm giảm các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng, viêm hô hấp trên, khô khè, khô rát lưỡi họng  
- Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh lý về mũi.

Sản phẩm của:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG INOMEX**  
Đc: số 274 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.  
Sản xuất tại:  
**CÔNG TY TNHH HÒA DƯỢC AERO CHEMIE**  
Đc: Số 19 đường Phúc Hậu, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội.  
Phân phối khu vực Miền Nam:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC ĐẠI PHÁT**  
Đc: 4/19 Lê Thị Út, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
Hotline: 0983.899.279

Dung dịch vệ sinh mũi

**NƯỚC BIỂN SÂU**  
**SEA LOVE**  
Người lớn

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**  
- Dùng tay ấn dứt khoát 3-4 lần mỗi bên mũi. Lau sạch, khô vôi xịt. Đậy nắp sau khi sử dụng.  
- Ngày dùng 3-4 lần hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết.  
- Sản phẩm an toàn khi sử dụng cho phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ em từ 3 tháng tuổi. Có thể sử dụng lâu dài.

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**  
- Người lớn và trẻ em trên 3 tháng tuổi.

**Chống chỉ định:**  
- Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của dung dịch.

**BẢO QUẢN:**  
- Để ở điều kiện thường, nơi khô mát. Để xa tầm với của trẻ em  
**HSD:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất  
**TCCS:**  
**SỐ TN:**

**Lô SX/Lot.No:**  
**NSX//Mfg.Date:**  
**HSD/Exp.Date:**



**THÀNH PHẦN:**  
Sodium Clorid, Nano Bạc, tinh dầu khuynh diệp, Benzalkonium Clorid, Nước tinh khiết vừa đủ.

**MỤC ĐÍCH/CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:**  
- Vệ sinh mũi hàng ngày khi tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm, thời tiết thay đổi, máy lạnh... giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho mũi, tẩy sạch mầm bệnh, để phòng ngừa bệnh hô hấp, viêm mũi, viêm xoang.  
- Tác dụng kháng khuẩn, tan chất nhầy, thông mũi nhanh chóng, giúp thở dễ dàng hơn.  
- Làm giảm các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng, viêm hô hấp trên, khô khè, khô rát lưỡi họng  
- Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh lý về mũi.

Sản phẩm của:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG INOMEX**  
Đc: số 274 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.  
Sản xuất tại:  
**CÔNG TY TNHH HÒA DƯỢC AERO CHEMIE**  
Đc: Số 19 đường Phúc Hậu, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội.  
Phân phối khu vực Miền Nam:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC ĐẠI PHÁT**  
Đc: 4/19 Lê Thị Út, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
Hotline: 0983.899.279

Dung dịch vệ sinh mũi

**NƯỚC BIỂN SÂU**  
**SEA LOVE**  
Trẻ em

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**  
- Dùng tay ấn dứt khoát 3-4 lần mỗi bên mũi. Lau sạch, khô vôi xịt. Đậy nắp sau khi sử dụng.  
- Ngày dùng 3-4 lần hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết.  
- Sản phẩm an toàn khi sử dụng cho phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ em từ 3 tháng tuổi. Có thể sử dụng lâu dài.

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**  
- Người lớn và trẻ em trên 3 tháng tuổi.

**Chống chỉ định:**  
- Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của dung dịch.

**BẢO QUẢN:**  
- Để ở điều kiện thường, nơi khô mát. Để xa tầm với của trẻ em  
**HSD:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất  
**TCCS:**  
**SỐ TN:**

**Lô SX/Lot.No:**  
**NSX//Mfg.Date:**  
**HSD/Exp.Date:**

