

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Khẩu trang y tế N95 Promask

Bước 1: Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt

Bước 2: Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang vào hai bên tai

Bước 3: Kéo nhẹ cạnh dưới qua cằm một chút, đặt thanh nẹp mũi lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi

Công dụng: ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn và các bệnh lành qua đường hô hấp

Lưu ý:

- Khẩu trang chỉ dùng một lần. Không sử dụng trong trường hợp khẩu trang đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng nhiều lần
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
- Không sử dụng chung khẩu trang với người khác
- Đeo khẩu trang đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
- Không dùng khẩu trang không rõ nguồn gốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG


Hoàng Thị Châm
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Thị Châm