

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế	Giày nâng chiều cao EVENup
Chỉ định	Lịch khung chậu tạm thời do sử dụng nẹp chỉnh hình hoặc bó bột.
Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đặt mũi giày của bạn vào phần trước của giày EVENup sao cho quai đeo nằm trên mũi giày.</li><li>- Kéo quai đeo đàn hồi về sau và bao lại gót giày. Đảm bảo logo EVENup trên quai đeo phần gót giày hướng ra ngoài.</li><li>- Điều chỉnh độ dài quai cài và dán lại để cố định giày của bạn.</li></ul>
Cách bảo quản	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đặt nơi khô ráo, thoáng mát, an toàn, hợp vệ sinh</li><li>- Tránh ánh nắng trực tiếp</li></ul>
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khi có dấu hiệu kích ứng, ngưng sử dụng sản phẩm và tham vấn ý kiến của nhân viên y tế.</li></ul>

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

*Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)*

*Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số*



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Xuân Diễm*