

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DỤNG CỤ GIẢM ĐAU CHO BỆNH NHI KHI TIÊM SHOTBLOCKER®



THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

#8050 – SHOTBLOCKER (HỘP 50 CHIẾC)
#8100 – SHOTBLOCKER (HỘP 100 CHIẾC)



SHOTBLOCKER® - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Lựa chọn vị trí tiêm và xử lý bề mặt da như bình thường.
2. Giữ ShotBlocker® để các điểm nhọn của ShotBlocker® tiếp xúc da bệnh nhân xung quanh vị trí tiêm.
3. **ẤN CHẶT** ShotBlocker® vào bề mặt da. (A) **ĐỪNG DI CHUYỂN HOẶC NHẮC SHOTBLOCKER® RA KHỎI VỊ TRÍ CHO ĐẾN TIÊM XONG.**
4. Tiến hành tiêm ngay lập tức như thông thường vào vị trí trung tâm phần mở của ShotBlocker®. Đối với mũi tiêm dưới da, đặt góc của đầu kim như yêu cầu. (B) **NẾU THỜI GIAN TỪ KHI ĐẶT SHOTBLOCKER® QUÁ 20 GIÂY MÀ VẪN CHƯA TIÊM, CẦN NHẮC SHOTBLOCKER® RA KHỎI DA VÀ THỰC HIỆN LẠI BƯỚC 2.**

Những gợi ý hữu ích khi sử dụng ShotBlocker®

- Giải thích cách thức ShotBlocker® sử dụng kỹ thuật phân tán để che dấu cơn đau.
- Vấn an bệnh nhân bằng cách cho họ cảm nhận được dụng cụ và giới thiệu cách thức hoạt động của nó.
- Khuyến bệnh nhân nhìn sang chỗ khác khi tiến hành tiêm.
- Ấn chặt ShotBlocker® vào bệnh nhân để đảm bảo các điểm nhọn tiếp xúc với da. (Điều này tạo các kích thích cảm giác cần thiết để ShotBlocker® hoạt động hiệu quả.)
- Sẽ đạt được kết quả tốt nhất với trẻ từ 4 tuổi trở lên.
- ShotBlocker® giảm đau và cảm giác khó chịu do các loại hình tiêm hàng ngày gây nên một cách đáng kể trong 80% thời gian tiêm (theo Hiệp hội Nhi khoa Maumee, 2002.)
- ShotBlocker® không loại trừ được cơn đau buốt từ thuốc nhưng chặn được cơn đau do chọc kim tiêm gây nên.

Phân phối độc quyền tại Việt nam bởi Công ty Cổ phần Công nghệ GISP Việt Nam