

## CÔNG TY TNHH MEDIFOOD

Địa chỉ: Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh  
ĐT: 0943293881

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(Hãng nước sản xuất: Jiagsu Senolo Medical Technology CO.,LTD)

TT	Sản Phẩm	Hướng dẫn sử dụng
1	<b>Băng bó bột thủy tinh</b> <i>Orthopedic Casting Tape.</i> Chủng loại/ Mã sản phẩm tương ứng: XD1            2.5cm*3.6m XD2            5.0cm*3.6m XD3            7.5cm*3.6m XD4            10.0cm*3.6m XD5            12.5cm*3.6m XD6            15.0cm*3.6m	B1: Nhúng bột vào chậu nước sạch ( nhiệt độ từ 15 - 30 độ C) trong vòng 1-3 giây. B2: Bóp bớt nước thừa , bó theo hình xoắn chồng lên nhau vùng tổn thương, vuốt nhẹ và chỉnh khuôn sao cho phù hợp và để thạch cao đông cứng ( sau khoảng 2-4 phút)
2	<b>Băng bó bột thạch cao</b> <i>Plaster Bandage</i> Chủng loại/ Mã sản phẩm tương ứng: 5x200cm,        7.5x200cm; 10x200cm;      12.5x200cm; 15x200cm;      20x200cm; 5x270cm,        7.5x270cm; 10x270cm;      12.5x270cm; 15x270cm;      20x270cm; 5x300cm,        7.5x300cm; 10x300cm;      12.5x300cm; 15x300cm;      20x300cm; 5x360cm,        7.5x360cm; 10x360cm;      12.5x360cm; 15x360cm;      20x360cm; 5x380cm...	1. Dùng băng lót, hoặc tất lót bọc vùng chấn thương cần bó 2. Hoặc tất lót bọc vùng chấn thương cần bó, tạo hình cố định 3. Đi găng tay 4. Mở bao bì sản phẩm và lấy ra khỏi túi 5. Nhúng sản phẩm vào nước sạch ở nhiệt độ phòng (25 <sup>0</sup> C) trong vòng 5-10 giây. Vắt sạch nước 6. Cuốn băng theo nhiều lớp chồng lên nhau tại vùng cần cố định hay chỉnh hình. Cuốn 3-4 lớp ở các vùng thông thường; cuốn 5-6 lớp ở những vùng chịu lực đè của cơ thể. Sau khi cuốn xong có thể chỉnh lại tư thế trong 2-5 phút. Sau đó 10 phút thì băng bó đã cố định hoàn toàn.

Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở  
Giám đốc



Đinh Như Quỳnh