

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Mô tả Sản phẩm

HySil Bite là một vật liệu lấy dấu khớp cắnsiliconđông cứng nhờ trộn thêm thành phần trong loại hộp nẹp sẵn 50ml để đo vết cắn chính xác.

HySil Bite thích hợp để việc lấy dấu khớp cắn vì nó có thời gian đông rắn ngắn, độ cứng cuối cùng cao sau khi đông cứngvìsự thuận tiện cho người dùng và ít biến dạng đàn hồi khi lấy ra.

Trước khi sử dụng

Kiểm tra hạn sử dụng, sự có mặt đầy đủ của vật liệu hoặc chất gây ô nhiễm ngoại lai và trạng thái bất thường của sản phẩm trước khi sử dụng. Người dùng nên hiểu đầy đủ và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Mục đích

Vật liệu đàn hồi này bao gồm polysiloxan tạo thành vật liệu giống như cao su phù hợp để làm vật liệu lấy dấu khớp cắn đàn hồi tùy thuộc vào các phản ứng.

Vật liệu liên quan

Polyme Polydimethylsiloxan, Polymethylhydro Siloxan;Silic Dioxit;
Silic Polyete, phức hợp bạch kim hữu cơ; Chất hoạt động bề mặt; Titan Dioxit;
Sắc tố oxit kim loại.

Hướng dẫn sử dụng

HySil Bite được sử dụng cho việc lấy dấu như dưới đây.

- Lấy dấu bề mặt khớp cắn
- Xác định bề mặt khớp cắn
- Ghi lại sau khi đặt khớp nối

Thận trọng

Không sử dụng sau ngày hết hạn. Không để lại bất kỳvật liệu lấy dấu còn lại nào trong rãnh hoặc khoang miệng. Không nuốt vật liệu lấy dấu. Nếu nuốt phải: hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu có vấn đề phát sinh hoặc vẫn tiếp diễn. Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu vô tình tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay lập tức và vệ sinh kỹ bằng nước rửa mắt hoặc nước. Hỏi ý kiến bác sĩ nếu có vấn đề phát sinh hoặc vẫn tiếp diễn. Sản phẩm này thường không gây ra phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm, không thể loại trừ phản ứng dị ứng với sản phẩm. Việc sử dụng các sản phẩm có chứa hoạt chất lưu huỳnh, nhôm clorua hoặc nito có hoạt tính (dây rút có chứa sắt sulfat, vật liệu lấy dấu polysulfua, v.v.) kết hợp với sản phẩm này sẽ cản trở phản ứng đông rắn của vật liệu vinylpolysiloxan. Việc sử dụng các vật liệu này đòi hỏi súc rửa sạchvùng lấy dấu để loại bỏ tất cả dư lượng, trước khi thực hiện lấy dấu. Không sử dụng găng tay cao su latex. Phân phối một lượng nhỏ vật liệu lấy dấu cho đến khi cáchchất nền và chất xúc tác xuất hiện đồng đều, sau đó gấn đầu trộn. Khi lấy dấu khớp cắn với một số phần cắn dưới và khoảng cách liên răng, hãy sử dụng các kỹ thuật chặn tiêu chuẩn. Tránh tiếp xúc với quần áo, vì vật liệu này không thể loại bỏ được bằng cách giặt khô. Nó chỉ được sử dụng bởi các bác sĩ và nha sĩ; cần tuân theo cách sử dụng và thận trọng.

Lưu ý dữ liệu kỹ thuật

Tên sản phẩm	Thời gian làm việc	Thời gian đông rắn trong miệng
	Trong miệng 37°C (99°F)	Thời gian tối thiểu trong miệng



HySil Bite

trên 30 giây

Trong vòng 1 phút 30 giây

Lưu ý

Để đảm bảo lấy dấu tối ưu, nhiệt độ của vật liệu phải là 23°C (73°F) trước khi áp dụng. Nếu không, thời gian làm việc và đóng rắn sẽ bị ảnh hưởng.

Hướng dẫn sử dụng: Vật liệu hộp nạp sẵn để sử dụng trong súng bơm 1: 1

Lắp hộp nạp sẵn vào súng bơm. Đảm bảo rằng các rãnh trên đế hộp nạp sẵn được chỉ xuống. Đòn bẩy nhựa sẽ không đóng nếu hộp nạp sẵn không được lắp đúng cách vào súng bơm. Tháo nắp hộp nạp sẵn. Nắp có thể được thay thế sau lần sử dụng ban đầu. Đẩy sâu pit tông vào hộp nạp sẵn và phân phối một lượng nhỏ vật liệu lấy dấu cho đến khi số lượng bằng nhau được đùn ra với cùng một tỷ lệ. Lấpmũi trộn trên hộp nạp sẵn và xoay đầu trộn 90 độ theo chiều kim đồng hồ để khóa vào vị trí. Bơm một lượng nguyên liệu cần thiết, trực tiếp vào phần lấy dấu sơ bộ hoặc vào ống tiêm phân phối. Để áp dụng vật liệu xung quanh răng đã chuẩn bị, hãy sử dụng ống tiêm phân phối hoặc hộp nạp sẵn có đầu trong miệng trên đầu trộn. Kiểm tra để đảm bảo vật liệu đã đóng rắn trước khi lấy ra khỏi miệng. Để nguyên mũi trộn đã sử dụng trên hộp nạp sẵn sau khi sử dụng hoặc thay thế nắp hộp nạp sẵn. Trước khi sử dụng lại hộp nạp sẵn, hãy tháo nắp hộp nạp sẵn hoặc tháo và loại bỏ đầu trộn đã sử dụng. Kiểm tra các lỗ hộp nạp sẵn để đảm bảo không có vật liệu được polyme hóa nào có mặt. Nếu có trường hợp như vậy, khơi thông các lỗ và bơm một lượng nhỏ vật liệu lấy dấu cho đến khi số lượng bằng nhau được phân phối ở cùng một tỷ lệ. Lấpmũi trộn mới và tiếp tục như mô tả ở trên.

Điều kiện bảo quản:


Lưu trữ ở nơi khô ráo ở 15 ~ 25°C (59-77°F).

Tránh xa ánh sáng mặt trời.

Cảnh báo

-Không sử dụng vật liệu lấy dấu HySil làm vật liệu đệm tạm thời.

-Không sử dụng vật liệu lấy dấu HySil với các chất silicon ngưng tụ, polyete, vinylsiloxanete hoặc polysulfua.

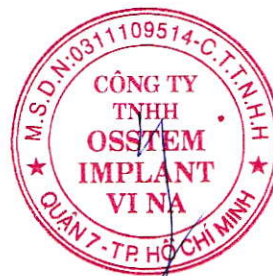

Kim Han Giang

