

ELPIS MEDICAL

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÈN MỎ

Models:

SolarMax LED 160 + 80; SolarMax LED 160; SolarMax LED 80; LED56 Mobile Stand; LED40 Mobile Stand; LED25 Mobile Stand;	LED SL88A; LED SL99A; SolarMax LED 56 + 40; SolarMax LED 56; SolarMax LED 40; SolarMax LED 40 + 25; SolarMax LED 25;
--	---

HÃNG SẢN XUẤT: ELPIS MEDICAL CO., LTD XUẤT XỨ: HÀN QUỐC

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Bước 1: Kiểm tra kết nối dây cắm nguồn điện, bật công tắc đèn
- Bước 2: Điều chỉnh thân đèn, đầu đèn lên/xuống và nghiêng theo góc cho phép đến vị trí mong muốn
- Bước 3: Chọn cường độ sáng phù hợp bằng phím trên bảng điều khiển
- Bước 4: Chỉnh tiêu cự trường sáng bắt cách xoay tay cầm
- Bước 5: Sau khi sử dụng xong thì tắt nguồn và vệ sinh đèn để sử dụng cho lần sau

II. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Hãy chắc rằng việc lắp đặt, vị trí đặt đèn chắc chắn, an toàn
- Hãy chắc chắn rằng mạch điện được kết nối đúng
- Khi đèn chiếu sáng, cần thận không được chạm vào bóng đèn cũng như nắp kính vì nhiệt độ tăng cao

- Khi thay bóng đèn không được chạm bóng với tay không.
- Hãy tắt nguồn điện và đợi đến khi bóng đèn nguội trước khi thay bóng đèn
- Để giảm nguy hiểm sốc điện, không tháo phần che đầu đèn ngoại trừ là kỹ sư đã qua đào tạo.

III. LIÊN HỆ BẢO HÀNH: CN CÔNG TY TNHH SX - TM VÀ KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM

Địa chỉ: 57 Đường S7 - Phường Tây Thạnh - Quận Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38161135 – 028.38161165.

CÔNG TY TNHH TM-TM & KT Y.E.S VIỆT NAM



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Nguyệt