

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: Găng tay y tế Nitrile (không bột) (Nitrile examination gloves)

1. Chung loại : Nitrile gloves/ size S,M,L,XL

2. Đặc tính sản phẩm:

- Không tiết trùng
- Dùng một lần
- Thuận cả hai tay
- Sản phẩm được làm từ cao su nhân tạo, không chứa protein gây dị ứng, được sản xuất trên công nghệ tiên tiến nhất giúp tăng tính đàn hồi và độ dẻo, mang tới những lợi ích tối ưu cho người dùng.

3. Nguyên liệu chính:

Găng tay khám bệnh không bột là 1 loại cao su nhân tạo, không chứa protein gây dị ứng. Găng được chế tạo từ hỗn hợp cao su cao su nitrile hoặc dung dịch nhựa nhiệt dẻo đàn hồi, hoặc hỗn hợp nhũ tương cao su styren – butadien. Để thuận tiện cho việc đeo găng, có thể phủ bất kỳ chất xử lý bề mặt, bôi trơn, bột hoặc polyme phù hợp.

4. Công dụng:

- Găng tay kiểm tra được dùng trong các hoạt động y tế, bệnh viện, phòng khám như tiểu phẫu, thực hiện các thủ thuật y khoa, thăm khám và chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân. Các trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa, các cơ sở nha khoa, phòng thí nghiệm... giúp ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình tiếp xúc giữa bệnh nhân và các nhân viên y tế.
- Ngoài ra găng tay kiểm tra còn dùng bảo vệ người dùng tránh nhiễm khuẩn, hóa chất độc hại của các dụng cụ làm việc đến tay và ngược lại.
- Sản phẩm có thể đeo được cho cả tay trái và tay phải.

5. Hướng dẫn sử dụng:

- Trước khi sử dụng găng tay, ta nên vệ sinh sạch sẽ hai tay bằng nước sạch, dung dịch tẩy rửa hoặc các loại xà phòng có tính làm sạch và lau khô tay để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn hay dịch bệnh từ người dùng khi sử dụng.



- Nên sử dụng sản phẩm không quá 2 giờ đồng hồ.
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Không dùng trong phẫu thuật.
- Xé các phần răng cưa trên mặt hộp để lấy sản phẩm đeo vào tay sử dụng.

6. Cảnh báo và lưu ý:

- Sản phẩm không tiệt trùng, không dùng trong các thủ thuật y tế thâm nhập chuyên sâu.
- Sản phẩm được làm từ cao su nhân tạo, không chứa protein gây dị ứng và phù hợp với mọi đối tượng sử dụng.
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy.
- Rửa tay ngay sau khi tháo bỏ găng tay.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

7. Bảo quản:

- Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt, tránh va chạm.
- Không để gần nơi chứa các hóa chất độc hại và không chồng chất vật nặng lên trên gây dập hay gãy bề sản phẩm, rách bao bì sản phẩm.
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng, không quá 38 độ C.
- Nếu sản phẩm không dùng để quá hạn sử dụng có thể xảy ra các trường hợp dính, đổi màu,...

8. Hạn dùng:

- 03 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì sản phẩm.

9. Quy cách đóng gói:

- 100 cái / hộp, 10 hộp / thùng. Kích thước và quy cách đóng gói có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường và khách hàng.

10. Công ty sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MEDICARE

Địa chỉ: 226 -228 Đường 19 tháng 5B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ xưởng sản xuất: Lô B, Cụm Công Nghiệp Phong Nẫm, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ
GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)



Đoàn Lê Ngọc Phi Lâm



