

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Chủng loại: Wash Solution No.3


Mã sản phẩm: 003B3099300, 003B3099400

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động. Thành phần: Oxalic acid Citric acid Polyethylene glycol 400
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	Không có
1.3	Mục đích/ Chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	Được sử dụng để rửa cuvette qua các trạm rửa. Dung dịch này được sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Dung dịch này được thiết kế cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động được sản xuất bởi Furuno Electric Co., Ltd. Dung dịch này cần được pha loãng theo mô tả của hướng dẫn vận hành.
1.5	Chống chỉ định	<ul style="list-style-type: none">Không trộn lẫn với các dung dịch hoặc nước rửa khác ngoại trừ nước tinh khiết.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none">Mang kính bảo vệ và găng tay để xử lý.Nếu sản phẩm tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa kỹ bằng một lượng lớn nước.Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, hoặc bị văng vào miệng, hãy rửa sạch chúng ngay lập tức với một lượng nước lớn và tới cơ sở y tế.Lưu trữ ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.Không lưu trữ trong tủ lạnh, nếu làm như vậy dung dịch sẽ bị kết tủa có thể xảy ra.Tránh xa trẻ em.Trung hòa với lượng nước lớn trước khi thải bỏ.Không trộn với bất kỳ dung dịch nào khác và dung dịch tẩy rửa trừ nước tinh khiết.Trong trường hợp sản phẩm thay đổi màu sắc hoặc chuyển sang màu đục do nhiệt độ, hãy giữ nó ở nhiệt độ phòng, đảo ngược chai nhiều lần và tiếp tục sử dụng.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không áp dụng
2	Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có):	



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
		Sản phẩm được lưu hành tại: Anh, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản
3	Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có): Chỉ định đăng ký tại các nước là như nhau.	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế - Hiện tại chưa có thông tin nào cho thấy sản phẩm đã gây ra hoặc góp phần vào một tác dụng bất lợi nào. - Sản phẩm không chứa tế bào, mô người hoặc động vật hoặc phái sinh của chúng, không chứa thành phần gây kích ứng, ion hóa..	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở 



GIÁM ĐỐC

BS: Nguyễn Xuân Thành

