

Số: 1220/HSDS4LOP

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2020.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KHẨU TRANG Y TẾ
Chủng loại: 4 LỚP**

1. Mô tả:

- Khẩu trang y tế có cấu tạo 4 lớp có tác dụng ngăn khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại.
- Lớp vải lọc không khí không thấm nước, không gây dị ứng da, thoáng khí.
- Lớp giấy kháng khuẩn có nguồn gốc thiên nhiên, tránh sự xâm nhập của vi khuẩn.
- Thanh tựa mũi để định hình, cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt.
- Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

2. Mục đích sử dụng:

- Ngăn vi khuẩn xâm nhập.

3. Hướng dẫn sử dụng:

Bóc bao bì; lấy khẩu trang ra; kéo dây chun đeo vòng qua tai; chụp khẩu trang kín miệng, mũi và cằm; nắn thanh nẹp mũi để che kín mặt.

4. Cảnh báo và thận trọng:

- Nên dùng một lần rồi bỏ. Không giặt và sử dụng nhiều lần.
- Mang khẩu trang vừa vặn, che kín miệng và mũi, không xê dịch khẩu trang.
- Không gây kích ứng da.

5. Điều kiện bảo quản:

- *Điều kiện bảo quản:* Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

6. Cơ sở sở hữu TTBYT:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Số 103 đường Vĩnh Tân, Cây Điệp, ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

7. Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Đường 2+6+7, Tổ 6, Khu phố 4, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai


8. Cơ sở phân phối:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Số 103 đường Vĩnh Tân, Cây Điệp, ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2020

GIÁM ĐỐC

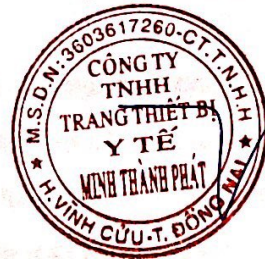

Phạm Công Minh