



Hướng dẫn sử dụng

DỤNG CỤ Y TẾ, HỘ ĐÈN SOI DA
VÀ PHỤ KIỆN


MEDIZINTECHNIK
seit 1890

KaWe



Dermatoskope

QM-1-101F

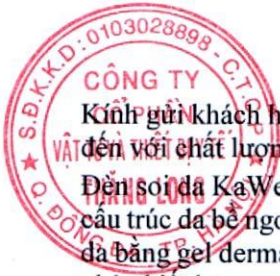

Kính gửi khách hàng, chúng tôi cảm ơn đã lựa chọn sản phẩm KAWE. Sản phẩm của chúng tôi được biết đến với chất lượng và tuổi thọ cao. Sản phẩm Kawe đáp ứng tiêu chuẩn EC 93/42/EEC.

Đèn soi da KaWe được sử dụng để kiểm tra sắc tố da, chẩn đoán sớm các khối u ác tính. Đèn này phóng to cấu trúc da bề ngoài 10 lần và chiếu sáng khu vực da được kiểm tra bằng bóng đèn halogen 2,5 / 3V. Làm ẩm da bằng gel dermatoscope đặc biệt (KaWe Derma-Gel) ngăn ngừa phản ứng da và làm cho sự đổi màu da dễ nhận biết hơn.

Hoạt động:

Đề đèn hoạt động lắp 2 pin AA 1.5V vào cán và sử dụng công tắc trượt on/off. Để bật thiết bị, trượt công tắc lên trên về phía đầu đèn. Tắt thiết bị bằng cách trượt công tắc theo hướng ngược lại trở về vị trí ban đầu.

Thay thế đèn:

Hoạt động của thiết bị được đảm bảo nếu dùng đèn KaWe nguyên bản vì những đèn này đảm bảo chất lượng ánh sáng tốt. Tháo đầu đèn ra khỏi cán và rút đèn bằng cách kéo nhẹ ra. Nếu cần làm sạch bằng cồn. Các bóng đèn phải được làm sạch đúng cách và không có dấu vân tay (không có dầu mỡ). Đèn phải được đẩy cẩn thận vào khe cho đến khi chạm vào chốt.

Sử dụng:

Làm ẩm khu vực cần kiểm tra bằng gel soi da đặc biệt KaWe Derma-gel. Bật đèn và để đĩa tiếp xúc nằm nhẹ trên da. Điều này sẽ cung cấp một vùng chiếu sáng đồng đều ở vùng da với tầm nhìn mở rộng (025mm). Xoay vòng tập trung bằng tay cho đến khi có được vùng tập trung xem tốt. Để đảm bảo tầm nhìn chính xác đèn soi da phải được đặt trong khoảng cách tối đa 5mm so với da.

Vệ sinh:

Loại bỏ bụi bẩn trên các bề mặt bằng vải mềm ẩm. Không bao giờ cho đèn soi da tiếp xúc với chất lỏng, việc làm sạch và khử trùng bằng chất khử trùng bề mặt có cồn là đủ. Kính lúp chỉ được làm sạch bằng nước lau kính.

Khử trùng:

Đĩa đo phải được khử trùng trong nồi hấp ở nhiệt độ 134°C trong tối thiểu 3 phút.

Bảo dưỡng và lưu trữ

Các bộ phận bị lỗi phải được loại bỏ và thay thế. Nếu thiết bị không hoạt động hãy làm theo các bước sau:

- Thay pin và đảm bảo đã được sạc
- Thay đèn và đảm bảo hoạt động tốt
- Gửi đi để sửa chữa

Đóng gói riêng trong túi vải hoặc có khóa kéo.