



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Mở hộp và kiểm tra, giường tay quay y tế là gói riêng biệt khi nó ở xa nhà máy. Phần thân chính được đóng gói, các phần khác là bao bì carton. Sau khi mở hộp, trước hết hãy kiểm tra xem tập ngẫu nhiên đã đầy đủ chưa, chúng chỉ kiểm tra, hướng dẫn vận hành và danh sách đóng gói (mỗi loại có một bản sao của chúng). Vui lòng kiểm tra xem phần thân và các bộ phận của mian đã hoàn chỉnh hay chưa dựa trên danh sách đóng gói. Tập tin ngẫu nhiên nên được lưu giữ đúng cách và tránh bị mất.
2. xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt và sử dụng giường y tế.
3. Việc lắp đặt giường tay quay y tế: vui lòng lắp đặt dựa trên hình ảnh 1 và tránh bị rơi.
4. Giường quay tay y tế nên được lắp đặt trên mặt đất bằng phẳng, để tránh va đập ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường.
5. Trước khi sử dụng, giường quay tay y tế phải trên cơ sở hướng dẫn “thủ công” để vận hành thử (chạy thử), khi mọi thứ bình thường thì mới đưa vào sử dụng chính thức.