



# Hướng dẫn sử dụng

## Model YXH-3B Băng ca có bánh xe đẩy bằng hợp kim nhôm sử dụng trên xe cứu thương

### I. Thông số kỹ thuật:

- Kích thước sản phẩm: (D x R x C) :
- Chiều cao tối đa : 193\*55\*85cm
- Chiều cao tối thiểu: 190\*60\*24cm
- Góc quay tối đa: 60°
- Kích thước thùng carton (1pc) : 196\*60\*30cm
- Trọng lượng tịnh: 40kg
- Tổng trọng lượng: 45kg
- Sức chịu tải: ≤159kg



### II. Cách sử dụng:

- Bề mặt băng ca được làm bằng xốp nệm mềm mại, làm cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái. Một nhân viên y tế có thể đẩy xe cứu thương
- Khi cần vị trí thấp, kéo cán an toàn & sau đó nhấn nó, chiều cao sẽ tự động giảm xuống.
- Khi đến nơi, kéo cán an toàn, chân cẳng sẽ tự động bung ra.
- Khi nâng đỡ bệnh nhân lên/ xuống, khóa chặt các chốt để đảm bảo an toàn
- Nhấn vào nút dưới cẳng, phần đầu sẽ được nâng lên hoặc hạ xuống.

### III. Ứng dụng cho:

Phòng khám, xe cứu thương, chiến trường bệnh viện, phòng tập thể dục, vv... để vận chuyển những người bị thương và bệnh nhân.

### IV. Lưu ý:

- Để đảm bảo an toàn khi nâng đỡ bệnh nhân, lưu ý khóa thiết bị và dây đai an toàn
- Cẩn thận không để ra rách bề mặt cẳng.

### V. Bảo quản:

- Vệ sinh hằng ngày (bao gồm khử trùng).
- Thường xuyên kiểm tra các bộ phận.

### VI. Lưu trữ và vận chuyển:

- Bảo quản nơi khô ráo.
- Các loại xe vận chuyển thông thường có thể vận chuyển sản phẩm này.
- Cấm xếp lộn ngược hoặc đảo lộn trong vận chuyển và lưu trữ. Sắp xếp hàng hoá theo hướng dẫn in trên bao bì.

Công ty TNHH Thiết bị y tế & Công cụ Zhangjiagang Xiehe T

Địa chỉ: Khu công nghiệp Fuqian, Bắc Suburb, Zhangjiagang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Điện thoại: +86-512-58197198 Fax: +86-512-58197195

Website: [www.xieeh.com.cn](http://www.xieeh.com.cn) [www.xieeh.en.alibaba.com.cn](http://www.xieeh.en.alibaba.com.cn)

Http://[www.xieeh.com.cn](http://www.xieeh.com.cn) E-mail: [xh2@xieeh.com.cn](mailto:xh2@xieeh.com.cn)