

Ngày 19 tháng 8 năm 2017

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tên cơ sở: **Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh**
- Địa chỉ 252 - 254 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, là cơ sở công bố trang thiết bị y tế :

Stt	Dụng cụ kiểm tra huyết áp	
1	Mục đích/chỉ định sử dụng	- Sản phẩm dùng để kiểm tra, theo dõi huyết áp.
2	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Kết hợp với Ống nghe huyết áp để sử dụng.- Khóa van xả hơi, bóp quả bóng cao su để hơi đi vào vòng bít đến khi căng lên (thông thường áp lực hơi ở vòng bít cao hơn huyết áp 20-30mmHg).- Xả van hơi từ từ để áp lực hơi bên trong vòng bít giảm nhẹ đến khi nghe được nhịp đập của tim, giá trị thể hiện trên đồng hồ huyết áp lúc này là giá trị tâm thu hay huyết áp tối đa.- Áp xuất trong vòng bít tiếp tục giảm đến một lúc nào đó thì âm thanh của nhịp tim sẽ không còn nghe rõ được nữa, giá trị thể hiện trên đồng hồ lúc này là huyết áp tâm trương hay còn gọi là huyết áp tối thiểu.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở
GIÁM ĐỐC**



ThS. NGUYỄN VĂN THẮNG