

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### HỘ HỆ THỐNG MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN GIẢI: EASYLYTE SERIES

#### 1. KIỂM TRA ĐẦU NGÀY

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy 100 - 220V, 50/60Hz
- Kiểm tra lượng hoá chất trước khi chạy máy.
- Khi tắt máy bật lại, chờ máy WARMING 30 phút.

#### 2. CHẠY MẪU

**Chú ý:** Trước khi chạy mẫu thì người sử dụng cần chạy chuẩn trước.

Đầu ngày máy đang ở chế độ **Stanby**.

Nhấn **NO** tìm đến chữ **CALIBRATE NOW?** Chọn **YES**. (Nếu máy yêu cầu rửa thì phải thực hiện rửa máy trước).

Máy sẽ thực hiện quá trình chuẩn máy. Sau khi máy chuẩn thành công màn hình sẽ hiển thị giá trị Slope, ta nhấn **NO**. Màn hình hiện **ANALYZE BLOOD?**

##### - Chạy bệnh phẩm:

Khi máy hiển thị : **ANALYZE BLOOD?**

Ấn phím : **YES**

Màn hình hiển thị : **PROBE IN BLOOD?**

Kim hút mẫu được đưa xuống, KTV đưa bệnh phẩm vào ngạp đầu kim hút rồi ấn phím YES.

Máy sẽ tự động hút mẫu và thực hiện quá trình phân tích mẫu . Sau khi phân tích xong kết quả sẽ được in ra.

#### 3. THỰC HIỆN RỬA MÁY HÀNG NGÀY (DAILY CLEANER)

- Khi màn hình hiển thị **DAILY CLEANER**, KTV ấn phím **YES**.

- Kim hút mẫu được đưa xuống, KTV đưa nước rửa ngạp trong kim hút rồi ấn **YES** máy sẽ thực hiện quá trình rửa . Sau khi hoàn thành máy tự động chuyển về chế độ **STANBY** (chế độ nghỉ của máy).

- Khi màn hình đang ở chế độ **STANBY** cần chạy mẫu KTV ấn phím **NO** màn hình sẽ hiển thị **CALIBRATE NOW?** ấn phím YES để thực hiện chuẩn máy.

**Chú ý:** Sau khi rửa máy điện cực có thể bị trôi, chuẩn máy không thành công ngay, KTV thực hiện lại lệnh chuẩn máy.

#### 4. Một số chức năng trong MENU máy

Khi màn hình hiển thị **SECOND MENU** KTV tìm đến các mục:

- **SEE RESULT?** để xem kết quả.

Ấn **YES** để xem lại kết quả chạy trước (LAST RESULT?/ RESULT DISLAYED) và in kết quả của bệnh nhân cần tìm.

- **PACK USAGE?** ấn YES để kiểm tra % hoá chất còn trong bình, thay một bình mới.

- **OPER FUNCTS** : ấn NO đến mục **DIAGNOSTICS?**

Ấn YES : trong mục này KTV có thể kiểm tra được và test được mV của các điện cực trong máy (kiểm tra sự ổn định của điện cực)

Ấn NO : KTV có thể thay đổi được ngày tháng của máy

**Chú ý khi có sự cố mà KTV không tự xử lý được cần liên hệ với kỹ sư hãng để cùng xử lý.**

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

