

Hướng dẫn sử dụng máy in Codonics Horizon



Máy in phim khô x-quang y tế Codonics Horizon, model: Horizon G, Horizon G1, Horizon G2, Horizon GS, Horizon Ci, Horizon XL

Máy in Horizon là hệ thống máy in khô thông minh, dạng để bàn, cung cấp phim y tế với chất lượng hình ảnh chẩn đoán vượt trội, đồng thời máy có khả năng in trên giấy grayscale (hình ảnh đen trắng) nếu tùy chọn thêm tính năng in ảnh trên giấy.

Hệ thống máy in này có thể tương thích với nhiều tiêu chuẩn đầu ra khác nhau, bao gồm : Công ra DICOM và chuẩn WINDOWS. Máy in Horizon có khả năng kết nối trực tiếp với thiết bị, nhiều nhất có thể kết nối 24 cổng DICOM cùng lúc. Đây là hệ thống với cấu hình tiêu chuẩn: in ảnh tốc độ cao, có khả năng kết nối mạng network.

Thao tác sử dụng đơn giản:

- 1. Bật nguồn*
- 2. Chờ máy kiểm tra trạng thái hoạt động*
- 3. Sau khi đèn báo ONLINE sáng thì sẵn sàng nhận lệnh in từ thiết bị chẩn đoán hình ảnh đã kết nối.*
- 4. Khi nhận hình ảnh truyền từ thiết bị chẩn đoán hình ảnh sang, máy sẽ tự động chọn phim theo kích thước yêu cầu và in hình ảnh lên phim.*