


**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**VỎ NHỰA ĐỂ CỐ ĐỊNH KIM LẤY MÁU 169018**


**Bước 1:**

- Vệ sinh vị trí cần lấy mẫu

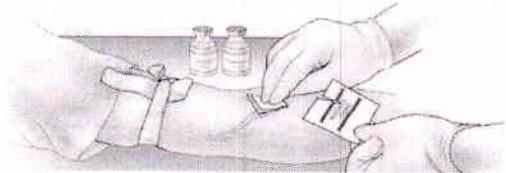

**Bước 2:**

Cố định đầu kim vào giá đỡ chân không (vặn chặt)

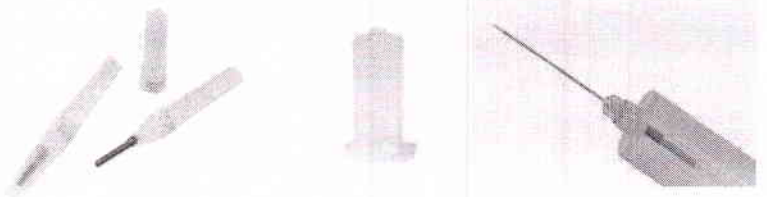

**Bước 3:**

- Cắm kim tại vị trí đã khử khuẩn
- Đưa ống nghiệm vào giá đỡ thực hiện lấy máu
- Rút ống nghiệm và lắc đều để máu được chống đông tốt

**Bước 4**

Rút kim, gỡ garo và băng vị trí lấy mẫu

Đóng chặt nắp bảo vệ đầu kim

**Bước 5**

Hủy kim và giá đỡ theo quy định



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hoàng Tuấn*

