

HDSĐ ĐÈN TIỂU PHẪU DI ĐỘNG

MODEL: L121111A. HÃNG SẢN XUẤT : PROVITA - ĐỨC



1. Giới thiệu chung

Những hướng dẫn sử dụng sau sẽ giúp bạn sử dụng đèn an toàn và hiệu quả hơn. Xin vui lòng đọc các hướng dẫn sau cẩn thận trước khi sử dụng đèn lần đầu. Chú ý vào các hướng dẫn. Đèn khám Series 1 được thiết kế để chiếu sáng cho bệnh nhân.

Đèn dùng trong phòng khô.

Chỉ người đã được hướng dẫn nên tập trung lại và vận hành đèn theo chỉ dẫn.

Không được phép sửa lại thiết bị.

Khi tuổi thọ của đèn đã hết, đặc biệt khi có vấn đề về chức năng, hãy tháo ổ cắm và tách cáp ra.

2. An toàn

Đặc biệt nguy hiểm tới trẻ em.

Không để đèn ở trạng thái “on” mà không giám sát và cảnh báo khi sử dụng ở gần chỗ trẻ em hoặc những người không nhận biết được sự nguy hiểm.

Trẻ em hoặc người không nhận biết được sự nguy hiểm thì không được sử dụng đèn. Vật liệu đóng gói không được sử dụng như là một đồ chơi trẻ em. Chúng có thể dẫn tới nguy hiểm.

Không được đập đèn lại. Sẽ rất nguy hiểm nếu sức nóng tích tụ lại.

3. Cài đặt

Mở kiện hàng ra gồm đèn và các phụ kiện, kiểm tra mọi chi tiết có còn nguyên vẹn không.

Không cắm điện cho đến khi đèn đã được lắp ráp hoàn toàn.

Lắp ráp Đèn di động theo các bước như hình:

