




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đèn mổ

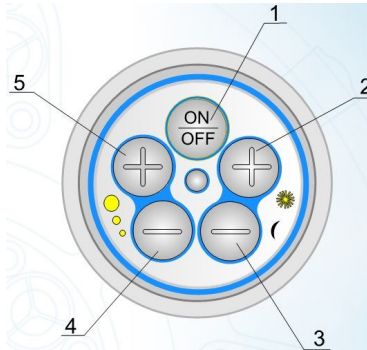

Vận Hành

1. Chọn vị trí đèn để có thể chiếu đèn lên vùng cần phẫu thuật.
2. Cắm nguồn thiết bị
3. Bấm nút 'ON' trên bản điều khiển đèn để bật nguồn.
4. Bấm nút '2' hoặc '3' để tăng giảm cường độ sáng.
5. Bấm nút '4' hoặc '5' để điều chỉnh hội tụ.
6. Tập trung điểm hội tụ lên vùng cần phẫu thuật.
7. Sau khi phẫu thuật xong – tắt nút nguồn – rút dây nguồn ra khỏi ổ điện.

Ghi chú:

- Làm vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng.
- Những hư hỏng xảy ra vui lòng gọi bộ phận kỹ thuật đến kiểm tra sửa chữa.

