

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

### XE LĂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT XE CÓ BÔ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

**Model :** XE-122L; XE-110LA; XE-110A; JAZZ-S50; ECLIP-X2; D-100; X-9; X-97; X-9B; X-97J; X-11; X-63L; X-16LJ; X-7L; X-39B; X-37BJ; X-69; X-8; X-600; X-980L; X-91L; X-75; X-35; X-601; X-307; X-303; X-8C; X-7; X-12; X-300L; G-696; G-26; GX-300; GX-200; GX-900



Tháo bỏ vỏ hộp kèm theo sản phẩm

Kiểm tra nhằm đảm bảo sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển

Cầm tay cầm, nhẹ nhàng tách 2 bên khung xe lăn sang 2 phía. Làm phẳng 2 bên gối kê bằng tay. Xe lăn sẽ mở 2 bánh xe sang 2 bên. Lắp bàn ăn khi cần thiết.

Đóng bàn tựa chân, nhẹ nhàng nâng chính giữa 2 phần đầu và cuối gối kê. Xe lăn sẽ gấp lại.

Ngồi lên xe lăn: vui lòng phanh bánh xe lăn trước. Giữ tay cầm và ngồi xuống xe lăn 1 cách từ từ

Xuống xe lăn: Phanh bánh xe trước, từ từ đứng lên và rời khỏi xe lăn.

Đẩy xe lăn: Đứng đằng sau xe, 2 tay nắm chặt tay nắm, đẩy xe chậm chậm, chú ý phía trước

Hãm xe lăn: Đứng ở cạnh xe lăn, 1 tay giữ tay cầm, 1 tay hãm phanh, khóa phanh hãm (Thực hiện tương tự ở phía còn lại). Luôn khóa phanh xe lăn mỗi khi dừng xe.

