

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: ĐÈN MỎ

1. Công dụng

Dùng hỗ trợ Y Bác sĩ trong việc khám, chữa bệnh, trong tiểu phẫu ở các cơ sở phòng khám, bệnh viện

2. Hướng dẫn sử dụng

- Đặt thanh đứng vào đế đèn và vít ốc vặn chặt để tạo thanh đứng vững chắc. Sau đó lắp bóng và để giữ bóng sao cho bóng có thể xoay qua lại được
- Đối với đèn treo trần đấu nối các giắc điện với nguồn điện, lắp bộ giữ giá treo, gắn giá trên bằng bu lông ốc vít cho chặt rồi gắn cụm đèn.
- Sau đó tăng giảm chiều cao sao cho phù hợp sau đó cắm điện bật đèn và sử dụng, tắt đèn sau khi dùng xong
- Sử dụng nguồn điện dự phòng: Khi nguồn điện lưới quốc gia hoạt động bình thường, công tắc điện ngõ vào của nguồn điện dự phòng và của đầu đèn sẽ bật, đèn lúc này hoạt động bình thường
- Trong trường hợp điện lưới gặp sự cố mất điện, bật công tắc và nguồn điện dự phòng sẽ cung cấp điện cho đèn.
- Khi điện lưới quốc gia có điện trở lại, đèn mỏ sẽ tự động chuyển sang chế độ sử dụng điện lưới quốc gia, đồng thời pin sạc sẽ được sạc điện.
- Khi không sử dụng đèn, trước tiên phải ngắt điện đầu đèn, sau đó ngắt điện của nguồn điện dự phòng. Sau cùng, rút phích điện ra khỏi ổ nguồn điện.

