



BEIJING SUCCEEDER TECHNOLOGY INC.

SFT-SPECIAL CLEANING LIQUID

Dung dịch rửa máy đông máu SF-series

Đóng gói

Mã số SF-LSL-L1810 18 x 10 ml

Chuyên dùng cho In Vitro

Mục đích sử dụng

SFT-Special Cleaning Liquid được thiết kế để sử dụng làm sạch các đầu kim hút nhằm loại bỏ các vấn đề nhiễm chéo trên hệ thống đo đông máu tự động hãng Succeeder SF-8200, SF-8100, SF-8050.

Thành phần

Dạng dung dịch thành phần có Natri sulfat, Polyether, Imidazole, Chất khử trùng, Chất hoạt động bề mặt, Chất ổn định, Chất bảo quản.

Chuẩn bị

SFT-Special Cleaning Liquid là dung dịch sẵn dùng. Không được lắc. Nếu cần, hãy đợi cho đến khi bọt khí và bọt tan mất trước khi sử dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho SF-8200, SF-8100, SF-8050.

Bảo quản và độ ổn định

SFT-Special Cleaning Liquid ổn định đến hạn sử dụng ghi trên nhãn hộp khi được bảo quản ở 2-8°C và tránh ánh sáng. Không được trữ đông. Tránh để tiếp xúc và phản ứng với không khí. Lọ mở nắp ổn định 14 ngày ở 20 - 30°C.

Đặc điểm hiệu suất

Dữ liệu hiệu suất điển hình có thể được tìm thấy trong Báo cáo thẩm định (Verification Report).

Ghi chú

1. Trong trường hợp tiếp xúc với da và niêm mạc, hãy rửa bằng nhiều nước. Đọc Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (Safety Data Sheet)
2. Mặc áo khoác phòng thí nghiệm và sử dụng kính bảo vệ và mang găng tay dùng một lần trong quá trình xử lý.

3. Chất thải tạo ra khi sử dụng dung dịch phải được coi là mối nguy sinh học tiềm ẩn và cần được xử lý cẩn thận. Tuân thủ luật pháp địa phương về quy trình xử lý chất thải. Chỉ cung cấp bao bì đã được làm rỗng hoàn toàn cho nhà máy tái chế.

Lưu ý an toàn

Nguy hiểm

• Báo cáo nguy hiểm

H360D Có thể làm hỏng thai nhi.

• Các báo cáo đề phòng

P234 Chỉ giữ trong hộp đựng ban đầu.

P308 + P313 Nếu bị phơi nhiễm hoặc lo ngại: Nhận tư vấn / chăm sóc y tế.

P405 bảo quản nắp hướng lên.

P501 Vứt bỏ nội dung / thùng chứa theo các quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.



Beijing Succeeder Technology Inc.


Tower 1A, No.27 Chuangxin Road, Tech Park, Changping District, Beijing 100020 China.

Tel: +86-10-53855569 Fax: +86-10-53855570 | www.succeeder.com.cn | aftersales@succeeder.com.cn



Quy trình sử dụng SFT-Special Cleaning Liquid

Trích hướng dẫn sử dụng của máy đo đông máu tự động SF-8100 Succeder

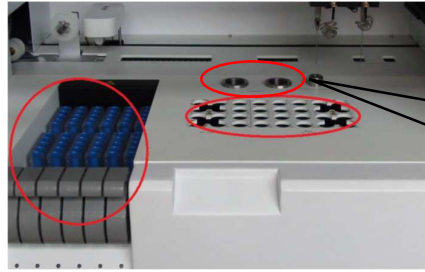

Vị trí T1, T2 đặt lọ SFT-Special Cleaning Liquid

1. Ngừng máy phân tích
2. Lấy 2 lọ SFT-Special Cleaning Liquid ra khỏi hộp, mở nắp và đặt vào vị trí T1-T2 ở khu vực đặt thuốc thử trên máy.
3. Nhấn "**Reagent Load**" từ trang chính của chương trình vận hành máy. Màn hình sau sẽ xuất hiện



4. Nhấn chọn "**T1**" nhấn "**Replace Bottle**".
5. Nhấn chọn "**T2**" nhấn "**Replace Bottle**".
6. Nhấn "**Exit**" để thoát màn hình thay thuốc thử.
7. Trong quá trình vận hành, nếu máy hiện cảnh báo sắp hết dung dịch rửa SFT- Special Cleaning Liquid, thực hiện thay dung dịch rửa theo các bước trên từ 1- 6

