



BEIJING SUCCEEDER TECHNOLOGY INC.

SFW-CLEANING LIQUID

Dung dịch rửa máy đo đông máu SF-series

Đóng gói

REF	SF-LNL-L0100	100 ml
IVD		

Mục đích sử dụng

SFW-Cleaning Liquid được thiết kế để sử dụng bảo trì và làm sạch đường ống trên hệ thống máy đo đông máu hãng Succeeder SF-8200, SF-8100, SF-8050.

Thành phần

Dạng dung dịch của Natri dodecyl sulfate, Chất khử trùng, Chất hoạt động bề mặt, Chất ổn định, Chất bảo quản.

Preparation

SFW-Cleaning Liquid là chất lỏng đậm đặc 10 lần. Đừng lắc.

1. Chuẩn bị pha loãng:

Pha loãng 1:10 dung dịch SFW-Cleaning Liquid, thực hiện bằng cách pha một phần SFW-Cleaning Liquid vào chín phần nước cất.

2. Dung dịch đã pha loãng SFW-Cleaning Liquid SFW tỉ lệ 1:10 sẵn sàng để sử dụng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho SF-8200, SF-8100, SF-8050.

Bảo quản và độ ổn định

SFW-Cleaning Liquid ổn định đến hạn sử dụng ghi trên nhãn bình khi được bảo quản ở 18-25 ° C tránh ánh sáng và nguồn nhiệt.

Tránh tiếp xúc và phản ứng với không khí.

Bình dung dịch sau khi mở nắp bần 1 tháng ở 20 - 30°C

Đặc điểm hiệu suất

Dữ liệu hiệu suất điển hình có thể được tìm thấy trong Báo cáo thẩm định (Verification Report).

Lưu ý an toàn

H412 Có hại cho đời sống thủy sinh với những ảnh hưởng lâu dài.

P234 Chỉ giữ trong hộp đựng ban đầu.

P260 Không hít phải bụi / khói / khí / sương mù / hơi / phun.

P262 Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo.

P281 Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân theo yêu cầu.

P303 + P361 + P353 NẾU TRÊN DA (hoặc tóc): Cởi ngay lập tức tất cả quần áo bị nhiễm. Rửa sạch da bằng nước / vòi hoa sen.

P305 + P351 + P338 NẾU VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ tháo. Tiếp tục rửa sạch. P337 + P313 Nếu vẫn tiếp tục bị kích ứng mắt: Nhận tư vấn / chăm sóc y tế.

P401 Lưu trữ phù hợp với qui định địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.

P501 tiêu hủy dung dịch / thùng chứa phù hợp với qui định địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.



Beijing Succeeder Technology Inc.


Tower 1A, No.27 Chuangxin Road, Tech Park, Changping District, Beijing 100020 China.

Tel: +86-10-53855569 Fax: +86-10-53855570 | www.succeeder.com.cn | aftersales@succeeder.com.cn




Quy trình sử dụng SFW-Cleaning Liquid

Trích hướng dẫn sử dụng của máy đo đông máu tự động SF-8100 Succeder

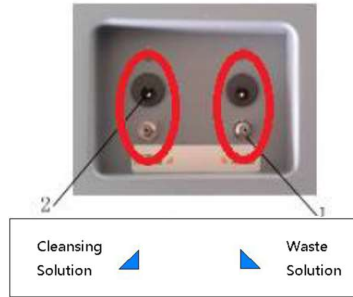

1. Ngừng máy phân tích
2. Kiểm tra kết nối bình dung dịch rửa (Cleaning Solution) và bình chứa dung dịch thải (Waste Solution) theo hình trên. Đầu kết nối gồm dây ống dẫn dung dịch và dây cảm biến dò mức dung dịch.
(Cổng kết nối nằm cạnh dưới, bên trái máy)
3. Châm đầy hoặc tối thiểu nửa bình dung dịch rửa với dung dịch đã pha loãng 1:10 SFW-Cleaning Liquid
4. Đổ bỏ bình thải
5. Trên giao diện phần mềm máy, nhấn **“Fill Pump Water”** để đuổi khí và châm đầy đường ống trong máy

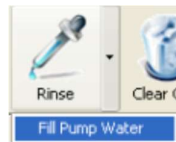

6. Máy đã sẵn sàng để vận hành.
7. Trong quá trình vận hành, nếu máy hiện cảnh báo sắp hết dung dịch rửa SFW-Cleaning Liquid, thực hiện thay dung dịch rửa theo các bước trên từ 1- 5

