

## CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: 9-9A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản xuất tại: NEW TAC KASEI CO.,LTD., 4148 Kamitakano, Toyonaka-cho, Mitoyo-shi, Kagawa, 769-1504, Nhật Bản

Tên trang thiết bị y tế: **BĂNG DÁN VẾT THƯƠNG**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2021

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

*Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm*

#### 1. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN

Miếng đệm hydrocolloid trong sản phẩm BĂNG DÁN VẾT THƯƠNG thấm hút và lưu giữ chất dịch (dịch tiết) tiết ra từ vết thương. Sau đó tạo thành lớp gel để cung cấp môi trường ẩm tối ưu cho quá trình lành vết thương. Chất dịch (dịch tiết) tiết ra từ vết thương có chứa các thành phần thúc đẩy sự phát triển và tái tạo tế bào, đóng vai trò quan trọng trong quá trình lành vết thương.

#### 2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Để bảo vệ, duy trì môi trường ẩm, thúc đẩy quá trình chữa lành và giảm đau các vết thương như vết cắt nhỏ, vết xước, vết thương hở, vết trầy, vết phỏng rộp và vết bỏng nhẹ.

#### 3. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM: Sản phẩm này bao gồm một lớp đệm hydrocolloid thấm hút và một lớp lót hỗ trợ. Sản phẩm được đóng gói riêng lẻ trong bao bì giấy vô trùng.

#### 4. CÁCH SỬ DỤNG

- (1) Giữ phần đầu (OPEN) của từng gói và mở dần. Dùng hai tay giữ cho miếng lót của sản phẩm hướng lên trên.
- (2) Kéo nhẹ sản phẩm theo cả hai hướng để có thể gỡ miếng lót ra.
- (3) Giữ cho miếng lót không tiếp xúc với mặt dính của sản phẩm. Gỡ lớp lót từ từ.
- (4) Đặt trọng tâm của sản phẩm lên trên vết thương, sau đó gỡ miếng lót còn lại.
- (5) Dùng tay ấn các cạnh của sản phẩm vào da để đảm bảo toàn bộ sản phẩm dính chặt vào da.

#### 5. THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

- a. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- b. Không sử dụng sản phẩm trên vết thương bị nhiễm trùng hoặc vết thương đóng vảy.
- c. Làm sạch vết thương và vùng da xung quanh kỹ lưỡng bằng nước máy trước khi sử dụng.
- d. Chọn sản phẩm có kích thước lớn hơn kích thước của vết thương.
- e. Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì đã bị mở. Không tái sử dụng sản phẩm.
- f. Không sử dụng sản phẩm cho trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi. Cần có sự giám sát của cha mẹ khi sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- g. Bệnh nhân đang điều trị bệnh tiểu đường hoặc rối loạn tuần hoàn máu nên nhờ bác sĩ tư vấn trước khi sử dụng.
- h. Bảo quản nơi khô mát, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- i. Tránh xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- j. Không sử dụng sau ngày hết hạn.

#### 6. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không tái sử dụng sản phẩm.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Tổng Giám Đốc



Muroki Miyaoka

