

Tp,HCM ngày 01 tháng 03 năm 2021

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi : Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kỹ thuật Minh Thành xin gửi bảng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế như sau:

Dụng cụ phẫu thuật:

- Đảm bảo thiết bị vô trùng trước khi sử dụng
- Sử dụng dụng cụ phù hợp với mục đích khuyến cáo của sản phẩm, tuân thủ đúng thông số kỹ thuật cho phép nhằm đảm bảo tuổi thọ sản phẩm và tránh gây cong, vênh, hư hỏng
- Tiến hành vệ sinh, hấp tiệt trùng sau khi sử dụng
- Chú ý : Để dụng cụ sử dụng được lâu bền không ngâm hóa chất quá lâu (dưới 30phút)
- Sau khi ngâm hóa chất phải tiến hành xả rửa và sấy khô.
- Dụng cụ có thể hấp tiệt trùng ướt, hoặc hấp nhiệt độ thấp (Autoclave) có công đoạn sấy khô.
- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
- Đối với dụng cụ hút sử dụng hút với vacuum trung tâm.

Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cát Cường