

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TRỘN XI MĂNG



Dụng cụ đóng gói tiệt trùng bằng EO & dùng 1 lần.

Hướng dẫn

Sản phẩm được đóng gói theo chiếc & đã tiệt trùng bằng EO & sử dụng 1 lần.

- Lĩnh vực ứng dụng:** Bộ bơm áp lực đẩy xi măng sử dụng để trộn xi măng trong chân không và dùng áp lực bơm xi măng đã được trộn vào các kim chọc bơm xi măng vào thân đốt sống. Sản phẩm được sử dụng cùng với bộ kit bơm xi măng tạo hình đốt sống của Adria – Ý trong quá trình phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cột sống, trong phẫu thuật tạo hình đốt sống.
- Cần bản:** Hướng dẫn cơ bản này không thay thế cho huấn luyện, sự cẩn trọng và kiến thức về kỹ thuật của người sử dụng. Do đó chúng tôi giả định rằng người dùng đã được biết tuân thủ các luật lệ pháp lý, các tiêu chuẩn cơ khí và các khuyến cáo.

HÃY ĐỌC CÁC HƯỚNG DẪN THẬT CÂN THẬN TRƯỚC KHI CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM LẦN ĐẦU TIÊN!

3. Nhãn mác

REF	Mã số hàng hay số đơn hàng
LOT	Mã số lô

- Mục đích sử dụng:** sử dụng cùng với bộ kit bơm xi măng tạo hình đốt sống của Adria - Ý
- Vật liệu:** Là nhựa tổng hợp được chấp thuận sử dụng cho các sản phẩm y tế và được kiểm chứng tính phù hợp sinh học.
- Bảo quản & Vận chuyển:** Tránh ánh nắng trực tiếp. Tránh mưa. cất giữ nơi khô ráo, sạch và ở nhiệt độ phòng.
- Mục đích sử dụng:** sử dụng để trộn xi măng trong chân không và dùng áp lực bơm xi măng đã được trộn vào các kim chọc bơm xi măng trong quá trình phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cột sống, trong phẫu thuật tạo hình đốt sống
- Hướng dẫn sử dụng:** Mở dụng cụ bằng cách gạt cần khóa về bên trái. Khi đó ta có thể dễ dàng kéo piston ra. Kéo piston xuống hết cỡ. Đặt dụng cụ vào giá đỡ. Đổ dung dịch vào ống trộn, tiếp theo đổ bột xi măng xương vào. Đậy nắp bằng van 1 chiều. Cầm dụng cụ và vừa xoắn vừa đẩy piston vào ra để trộn trong 30 giây.