

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Sở hữu và Sản xuất bởi **CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM ICCI**  
Địa chỉ : Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: <b>SILVER SALINE BABY(Mã sản phẩm ICCI.03)</b>	
1.1	<b>SILVER SALINE BABY (Mã sản phẩm ICCI.03)</b>	<p>- <b>Tên sản phẩm: SILVER SALINE BABY (Mã sản phẩm ICCI.03)</b></p> <p>- <b>Mô tả: SILVER SALINE BABY (Mã sản phẩm ICCI.03)</b> được đóng trong túi/ chai/ bình/ tuýp đựng được làm bằng thủy tinh / PE/ PET... gồm 3 bộ phận nắp bình, thân bình và đầu bình</p> <p><b>Thành phần:</b> Natri clorid, acid hyaluronic, benzalkonium chlorid, nano bạc, nước tinh khiết vừa đủ.</p> <p><b>Nguyên lý hoạt động:</b> Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng, đặt ngón trỏ lên đầu vòi phun, đưa nhẹ nhàng vòi phun vào lỗ mũi, ấn nhanh đầu phun từ 1-2 lần mỗi bên mũi để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài hi sạch và lau mũi. Lau sạch vòi phun, đậy nắp bảo vệ.</p>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	- Nhãn và Hộp đúng quy cách ;
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<p>- Hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang và viêm mũi dị ứng.</p> <p>- Làm sạch dịch nhầy, gi mũi, tạo cảm giác thông thoáng, dễ thở và mát dịu.</p> <p>- Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của mũi, phục hồi các niêm mạc suy yếu, loại bỏ vi khuẩn có thể lây nhiễm trong vùng tai, mũi, họng</p>



1.4	Hướng dẫn sử dụng	Xịt 1-2 lần mỗi bên mũi, 3-5 lần/ngày hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết. <b>Đối tượng sử dụng :</b> - Người tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, thay đổi thời tiết, không khí khô lạnh. - Người bị cảm cúm, nghẹt mũi, sổ mũi, khô rát mũi do viêm mũi xoang cấp, mạn tính, viêm đường hô hấp trên. - Dùng an toàn cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.
1.5	Chống chỉ định	Không sử dụng với người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: - Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng, nhiệt độ thường, tránh ánh nắng trực tiếp.	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Phương Thanh*