



Baby  
**SILVER  
SALINE**



HUY HOANG  
PHARMA

Dung dịch xịt mũi  
**SILVER  
SALINE**  
BABY

#### THÀNH PHẦN

Natri clorid, acid hyaluronic, benzalkoni-um clorid, nano bạc, nước tinh khiết vừa đủ.

#### CÔNG DỤNG

Hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng.

Làm sạch dịch nhầy, giảm mùi tạo cảm giác thông thoáng, dễ thở và mát dịu. Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của mũi, phục hồi các niêm mạc suy yếu, loại bỏ vi khuẩn có thể lây nhiễm trong vùng tai, mũi, họng.

#### ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, thay đổi thời tiết, không khí khô lạnh.

Người bị cảm cúm, nghẹt mũi, sổ mũi, khô rát mũi do viêm mũi xoang cấp, mạn tính, viêm đường hô hấp trên. Dùng an toàn cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

#### CÁCH DÙNG

Xịt 1-2 lần mỗi bên mũi, 3-5 lần/ngày hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết

#### BẢO QUẢN

Nơi khô ráo thoáng, nhiệt độ thường tránh ánh nắng trực tiếp.

**Chống chỉ định:** Không sử dụng với người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Thương nhân chịu trách nhiệm và sản xuất sản phẩm:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI**

Địa chỉ: Số nhà 17, Phúc Hậu, Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội



HUY HOANG  
PHARMA

Dung dịch xịt mũi  
**SILVER  
SALINE**  
BABY

#### CÁCH SỬ DỤNG



1. Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng



2. Đặt ngón trỏ lên đầu vòi phun



3. Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào lỗ mũi, ấn nhanh đầu phun từ 1-2 lần mỗi bên mũi, để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài, hít sạch và lau mũi



4. Lau sạch vòi phun, đậy nắp bảo vệ

Sản phẩm phân phối độc quyền bởi:

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI  
HUY HOANG PHARMA**

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Hậu, Tân Thành,  
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Hotline: 0931486129

TCCS :

SĐK :

Lô SX :

NSX :

HSD :



#### THÀNH PHẦN

Natri clorid, acid hyaluronic, benzalkonium chlorid, nano bạc, nước tinh khiết vừa đủ.

#### CÔNG DỤNG

Hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng.  
Làm sạch dịch nhầy, gỉ mũi, tạo cảm giác thông thoáng, dễ thở và mát dịu.  
Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của mũi, phục hồi các niêm mạc suy yếu, loại bỏ vi khuẩn có thể lây nhiễm trong vùng tai mũi họng.

#### ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, thay đổi thời tiết, không khí khô lạnh.  
Người bị cảm cúm, nghẹt mũi, sổ mũi, khô rát mũi do viêm mũi xoang cấp, mạn tính, viêm đường hô hấp trên.  
Dùng an toàn cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

**Chống chỉ định:** Không sử dụng với người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.



#### CÁCH DÙNG:

Xịt 1-2 lần mỗi bên mũi, 3-5 lần/ngày hoặc có thể sử dụng nhiều hơn khi cần thiết.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, thoáng, nhiệt độ thường, tránh ánh nắng trực tiếp

TCCS:

SỐ ĐKSP:



Lô SX/Lot No. :

NSX/Mfg.date :

HSD/Exp.date :

Thương nhân chịu trách nhiệm và sản xuất sản phẩm :

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI**

Địa chỉ: Số nhà 17, Phúc Hậu, Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Sản phẩm phân phối độc quyền bởi :

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI**

**DỊCH VỤ HUỖNG PHARMA**

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Hậu, phường Tân

Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0931486129

