

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cuvet dùng cùng máy xét nghiệm đông máu


Chủng loại: Cuvette racks and balls

Mã sản phẩm: 050-290

Cuvette Racks

Cuvet được thiết kế để sử dụng một lần. Bên trong mỗi cuvet có một bi từ để khuấy, bi từ phải được đặt trong cuvet trước khi sử dụng. Xem phần “Dụng cụ phân phối bi”.

Các cuvet được kết hợp thành một giá đỡ cuvet gồm bốn cuvet đôi. Tại phần nối giữa các cuvet có các khớp bẻ.

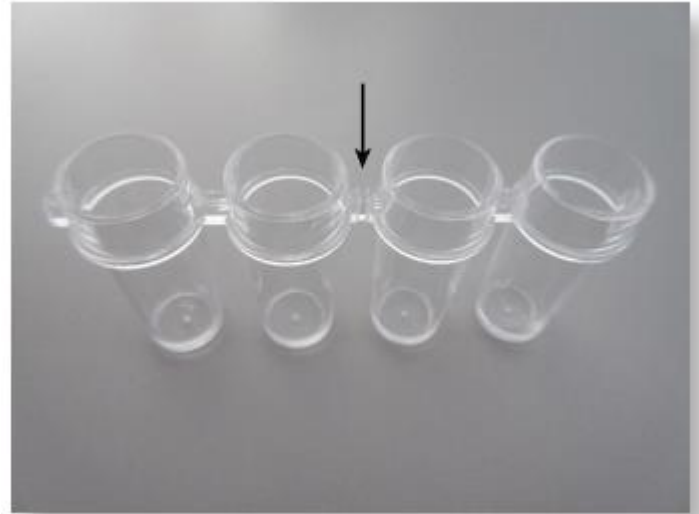

CHÚ Ý!

Không sử dụng cuvet đơn!

Kể cả trong trường hợp chỉ một xét nghiệm được thực hiện.

CHÚ Ý!

Chỉ sử dụng các sản phẩm chính hãng Behnk để đảm bảo chức năng của máy xét nghiệm.

Dụng cụ phân phối bi

Dụng cụ phân phối bi được sử dụng để lắp một viên bi thép vào mỗi cuvet.

