

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GIƯỜNG BỆNH NHÂN DÙNG TAY QUAY

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Thủy Nhi

Địa chỉ: Số 149 phố Yên Phụ, phường Yên phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội,
Việt Nam.

Model: A81, A82, A83, A83-03, A83-05, A83-09, A85, A85-03, A85-04, A85-05,
A85-09

Hướng dẫn sử dụng

1. Khung giường: Đặt ngửa thân giường xuống bề mặt phẳng, lắp các tay quay để Nâng đầu, nâng hạ chân, mở bộ vệ sinh. Lắp chân giường vào thân giường. Lắp bốn bánh xe vào 4 chân giường.
2. Thành chắn: Lắp thành chắn vào hai bên thân giường. Thành chắn có thể nâng lên, gập xuống chỉ với một nút bấm
3. Tấm nhựa ABS đầu giường và cuối giường: Mở 2 chốt khóa 2 bên rồi đưa đồng thời hai bên đầu giường/ cuối giường vào sao cho chốt định vị khớp với rãnh cố định, nhấn mạnh xuống và móc cố định lại
4. Đặt cây truyền dịch vào ống có sẵn trên thân giường
5. Hệ thống tay quay:
 - Phạm vi nâng lưng: $0 - 80^{\circ}$
 - Phạm vi nâng chân: $0 - 45^{\circ}$
 - Phạm vi hạ chân: $0 - 90^{\circ}$
 - Phạm vi nghiêng trái, phải: $0 - 80^{\circ}$
6. Đệm: Đệm xơ dừa thông thoáng
7. Đặt bàn ăn: Dựng thanh lan can hai bên lên, đặt hai rãnh bên bàn ăn vào với hai bên lan can


Cảnh báo và thận trọng

Không đặt tay vào các bộ phận chuyển động của giường

Không sử dụng quá tải trọng của giường

Không ngồi lên lan can hoặc bấm liên tục vào nút bấm màu đỏ

Khi quay hết tay quay, tuyệt đối không cố gắng quay tiếp sẽ làm gãy trục quay

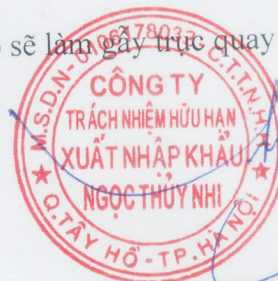

GIÁM ĐỐC

Bùi Kim Thủy