

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Miếng che mắt dùng trong điều trị bệnh vàng da Neoshades

MODEL: N720; N721, N722, N724, N725, N726, N727, N728, N729

Cách sử dụng:

Bước 1 Chọn kích thước thích hợp.

Bước 2 Đặt dây quai đầu ra phía sau đầu của trẻ

Bước 3 Che mắt bằng NeoShades.

Bước 4 Nhẹ nhàng gắn vải móc vào cuối dây quay đầu vào NeoShades.

Lặp lại cho bên đối diện.

Lưu ý: Quai có thể được cắt bớt cho vừa vặn

Cảnh báo:

- NeoShades không dành cho người lớn.

- NeoShades chỉ nên được sử dụng khi bệnh nhân đang dưới sự giám sát liên tục, trực tiếp của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

- Chỉ sử dụng cho một bệnh nhân.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo



The image shows a red circular stamp with a white center. The text around the stamp reads "CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM AN ĐỨC" at the top, "M.Đ.N 0105841840" at the bottom, and "Fax: 04 38 111 888" in the middle. In the center of the stamp is a stylized red logo. Overlaid on the stamp is a blue handwritten signature.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Mai