

Tên sản phẩm: Miếng giữ ống thông rốn Neo Bridge

MODEL: N700, N701, N702

Số seri: In trên bao bì sản phẩm

Số lưu hành:

Số lô: In trên bao bì sản phẩm

Xuất xứ: Mỹ

Quy cách đóng gói: 20 chiếc/hộp

Công dụng: NeoBridge nhằm mục đích giữ và hỗ trợ các ống thông rốn. Nó được thiết kế để sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ em

Cách sử dụng:

- Chuẩn bị:

+ Sau khi đã đưa ống thông catheter vào, làm sạch và lau khô da theo quy trình của bệnh viện.

Lưu ý: Điều quan trọng là da phải sạch và khô nhất có thể. NeoBridge sẽ không bám dính đúng vào da hoặc tóc ẩm. Dầu và kem dưỡng da cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến độ kết dính.

+ Không dùng cồn để làm sạch

Ứng dụng

Bước 1 Trước khi tháo lớp lót, hãy làm ấm NeoBridge trong tay trong 60 giây. Cũng có thể được giữ dưới nhiệt độ tỏa nhiệt trong 10 đến 15 giây.

Bước 2 Loại bỏ lớp lót giấy màu trắng, sau đó bóc và loại bỏ lớp lót trong suốt bằng nhựa hydrocolloid.

Bước 3 Với đường rạch ngang ở bên phải và đầu rộng hơn của miếng dán hydrocolloid hướng về phía đầu bệnh nhân, luồn ống thông qua trung tâm của NeoBridge.

Bước 4 Thoa lớp nền lên da và giữ yên trong 60 giây để đảm bảo độ bám dính thích hợp.

Bước 5 Bóc và loại bỏ lớp lót mờ từ nửa trên của miếng dán. Đưa miếng dán lên và dán (các) ống thông vào để võ theo hình vòm hoặc hình chữ U để giảm thiểu lực căng khi (các) ống thông luồn ra khỏi mặt bên .

Lưu ý: Không kéo dài (các) ống thông vào khu vực màu xanh lá cây của miếng dán. Nếu sử dụng hai ống thông, mỗi ống thông luồn ra mỗi bên của miếng dán.

Bước 6 Bóc và loại bỏ lớp lót mờ ở nửa dưới của miếng dán. Đưa miếng dán lên để căn chỉnh vùng màu xanh lá cây của nửa dưới với vùng màu xanh lá cây của nửa trên và ấn chặt vào nhau, bao bọc (các) ống thông giữa các nếp dính.

Bước 7 Kéo các cánh tà ra để tháo hoặc đặt lại (các) ống thông khi cần, sau đó đóng lại để cố định.

Loại bỏ

Bước 1 Thay thế NeoBridge 5 ngày một lần hoặc theo quy trình của bệnh viện, tùy theo điều kiện

Bước 2 Kéo các cánh ra xa nhau để tháo (các) ống thông.

Bước 3 Làm giãn NeoBridge bằng nước hoặc nước muối.

Bước 4 Từ từ bóc NeoBridge ra khỏi da khi dùng nước hoặc nước muối sinh lý.

Cảnh báo:


- Chỉ nên được sử dụng khi bệnh nhân dưới sự giám sát liên tục, trực tiếp của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được đào tạo.
- Không dùng cồn để làm sạch khi sử dụng
- Ngưng sử dụng ngay nếu bị kích ứng da.
- Chỉ sử dụng cho một bệnh nhân.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo

Năm sản xuất, hạn sử dụng: In trên bao bì sản phẩm

Hãng SX: Neotech Products LLC , 28430 Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355

Chủ sở hữu số lưu hành TBYT/ Đơn vị bảo hành: Công ty TNHH Quốc tế Việt Nam Ấn Độ, Khu văn phòng, Tầng 2, Tháp N04B.T1 Tòa nhà Lanmark, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Mai