

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HÓA CHẤT TẨY RỬA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
MATRIX

1. Mô tả: Matrix là dung dịch chất làm sạch không chứa enzyme dùng để làm sạch ban đầu dụng cụ, thiết bị y tế, có thể sử dụng trong bồn rửa, máy rửa sóng siêu âm và máy rửa dụng cụ nội soi.
2. Mục đích sử dụng/ Chỉ định: Sử dụng cho tất cả các dụng cụ trong y tế, kể cả ống nội soi (cứng, mềm)
3. Chống chỉ định: không có
4. Hướng dẫn sử dụng
Làm sạch dụng cụ trong bồn ngâm/thùng ngâm Pha với nồng độ 10ml/L (1%) trong nước ấm (<35 độ C), thời gian tiếp xúc 2-10 phút. Trong trường hợp dụng cụ bẩn hơn thông thường: pha với nồng độ 50 ml/L (5%)
Làm sạch dụng cụ trong máy rửa sóng siêu âm: pha với nồng độ 10 ml/L, đặt thời gian 2-10 phút
Làm sạch dụng cụ trong máy rửa dụng cụ nội soi: pha với nồng độ 5 ml/L
5. Cảnh báo và thận trọng
 - Sản phẩm không được phân loại là hóa chất nguy hiểm
 - Mang trang phục phòng hộ khi sử dụng hóa chất
 - Tránh tiếp xúc với da, mắt, không cố hít
6. Điều kiện bảo quản
 - Bảo quản nơi khô, mát, thông khí tốt
 - Nhiệt độ bảo quản: không quá 30 độ
 - Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng

7. Chủ sở hữu số lưu hành:


Công Ty Cổ Phần Group Phát Triển Sức Khỏe

Địa chỉ: số 130b, ngõ 128 phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Website: hdgmed.vn

Tp. Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

Đại diện pháp luật

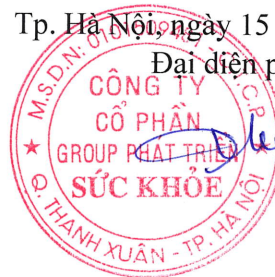

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phượng