

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	Ngày 13.03.2021	Version 4
	DÂY TRUYỀN DỊCH TĨNH MẠCH CÓ BẦU	Trang 1	

Mục đích sử dụng: Sản phẩm này được sử dụng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân qua tĩnh mạch

1. Mở tất cả các kẹp. Vô trùng nắp cao su của chai dịch và đâm kim ống vào chai dịch.
2. Đóng kẹp On/Off và khóa nút điều chỉnh, treo chai dịch lên.
3. Mở kẹp On/off và điều khiển dịch truyền vào bầu ghi lượng(Burette) và sau đó đóng kẹp on/off. (Khi dung dịch không thể chảy trơn tru vào bầu ghi lượng(Burette), nhấn và nhả bầu ghi lượng (Burette) sau đó dung dịch có thể chảy trơn tru)
4. Cài đặt ống kim và bóp bầu truyền dịch để cho dung dịch vào nửa bầu truyền dịch
5. Mở khóa nút điều chỉnh (Flow regulator) để đẩy không khí ra và sau đó đóng lại.
6. Mở kẹp on/off và thiết lập lại dung dịch vào burette. Đóng kẹp on/off.
7. Sau khi tiêm vào tĩnh mạch, mở khóa nút điều chỉnh (Flow regulator) từ từ và điều chỉnh tốc độ truyền dịch
8. Quan sát tốc độ truyền dịch và điều chỉnh dòng dịch truyền. Tốc độ truyền dịch là khoảng 60 giọt = 1ml (c. c.)
9. Khi truyền dịch trực tiếp từ chai dịch, vui lòng đóng kẹp (nhánh thông khí) or Air inlet và mở kẹp on/off
10. Sử dụng dây truyền dịch tĩnh mạch có bầu có van an toàn, vui lòng đặt lại dung dịch vào burette, nếu burette hết dung dịch và thiết lập lại dung dịch vào burette. Nếu van an toàn bị chặt xuống đáy và không nổi, vui lòng di chuyển bộ điều chỉnh lại gần buồng nhỏ giọt và đóng chặt con lăn và sau đó vặn hai vòng ống để nhấn burette, van an toàn sẽ tự động nổi lên.
11. Sản phẩm sau khi sử dụng được xử lý theo quy định rác thải y tế.

Perfect, ngày 13 tháng 03 năm 2021

