

NHÃN SẢN PHẨM



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI YERSIN**



GIÁM ĐỐC
Lâm Văn Việt

NHÃN SẢN PHẨM

Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi:
ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI (HMU)



ĐƠN VỊ SỞ HỮU:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI YERSIN
Tầng 2, số 9A² tập thể bệnh viện Bạch Mai,
tổ dân phố số 2, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC NGUYỄN THIỆU
Lô 1A, Cụm Công nghiệp Quỳnh Hồng, Xã Quỳnh Hồng,
Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

Số lưu hành TTBYT; NSX; HSD:
Vui lòng xem trên vỏ hộp

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm
yersin.com.vn



8 938535 109061



Chlorhexidine

Plus

- SÁT KHUẨN VÙNG HỌNG, MIỆNG
- KHÔNG CHỨA CỒN
- ĐƯỢC CHUYÊN GIA Y TẾ KHUYẾN DÙNG



250ml

THÀNH PHẦN:
Chlorhexidine 0,12%, sodium citrate, hương mint, nước RO.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm, nhiễm khuẩn ở họng/miệng như: Viêm họng, viêm amidan, viêm lợi, viêm miệng...
- Sát khuẩn, ức chế sự hình thành mảng bám trên răng, vệ sinh răng miệng
- Đẩy mạnh làm lành vết thương sau phẫu thuật hoặc điều trị nha khoa
- Kiểm soát loét miệng tái phát
- Kiểm soát nhiễm nấm miệng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Súc ki họng/miệng trong khoảng 30 giây với 15ml
- Mỗi ngày 2-3 lần
- Trong phẫu thuật răng, bệnh nhân cần được chỉ dẫn súc miệng trước khi điều trị

THÔNG TIN CẢNH BÁO:
Người dùng quá mẫn với các thành phần của sản phẩm. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, giữ nhiệt độ mát, tránh tiếp xúc ánh nắng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI YERSIN



GIÁM ĐỐC
Lâm Văn Việt