



## CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN

Địa chỉ: 2/1/12 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 03/03/2021

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN PHẪU THUẬT

**1. TÊN SẢN PHẨM: ĐÈN PHẪU THUẬT HAI NHÁNH**

**2. CHUNG LOẠI: OL-01; TL-01.**

**3. HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT VÀ CHỦ SỞ HỮU: INFIMED Spółka z ograniczona odpowiedzialnością**

Địa chỉ: ul. Kabaty 1, 34-300 Zywiec, Poland

**4. LƯU Ý SỬ DỤNG:**

- Tránh để hóa chất hoặc các dung dịch khác tiếp xúc với điều khiển và hệ thống điện của đèn phẫu thuật.
- Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Kiểm tra công tắc và đảm bảo chúng có thể hoạt động.
- Vui lòng xác nhận tất cả các đường dây điện được kết nối ổn định, an toàn.
- Cẩn thận khi vận chuyển và lắp đặt đèn
- Hãy chú ý đến tần số cung cấp, lực căng điện và danh nghĩa trở kháng
- Không chiếu trực tiếp ánh sáng vào mắt
- Không chạm tay vào bóng khi đèn đang sáng.
- Cần cẩn thận khi vận chuyển hoặc xử lý thiết bị để tránh làm hỏng thiết bị.
- Thiết bị này nên được nhân viên có chuyên môn kiểm tra hoặc bảo dưỡng thường xuyên.
- Khi thay thế các bộ phận cần đảm bảo sử dụng các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp.
- Thiết bị liên lạc RF di động hoặc di động sẽ ảnh hưởng đến thiết bị điện tử y tế. Khi lắp đặt thiết bị này cần đảm bảo rằng môi trường lắp đặt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
- Vui lòng kiểm tra bảng điều hành theo thời gian.
- Sau khi nhận thấy đèn không hoạt động, vui lòng ngừng sử dụng.
- Sau khi sử dụng: để trở về tình trạng cũ, tắt đèn và cắt nguồn điện; Đặt bộ điều khiển từ xa vào đúng vị trí; Làm sạch và khử trùng đèn sau khi thao tác.

**5. CÁCH VẬN HÀNH**

**5.1. Chuẩn bị trước khi sử dụng**

- Khử trùng tay cầm khử trùng.
- Kiểm tra:



- Đảm bảo rằng nguồn điện trong phòng phẫu thuật hoạt động bình thường.
- Môi trường nhiệt độ và độ ẩm trong nhà đạt yêu cầu.
- Độ chiếu sáng bình thường của đèn mổ.
- Hệ thống đèn phẫu thuật không xảy ra hiện tượng lệch

## 5.2. Cách vận hành

### a) Điều chỉnh vị trí của đầu đèn thông qua tay cầm khử trùng:

- Có thể sử dụng tay cầm điều khiển bằng nhựa vô trùng, đã được tiệt trùng để di chuyển đầu đèn đến vị trí đã định và điều chỉnh cường độ ánh sáng, kích thước trường ánh sáng và nhiệt độ màu.

### b) Điều chỉnh độ chiếu sáng của đèn phẫu thuật thông qua bảng điều khiển.

Bảng điều khiển loại cảm biến (tiêu chuẩn) cho phép điều chỉnh:

- Cường độ chiếu sáng nội soi
- Chuyển đổi BẬT / TẮT
- Kích thước ánh sáng Feld (tùy chọn)
- Điều chỉnh nhiệt độ màu (tùy chọn).

### Bảo quản:

- Nhiệt độ phòng, nơi khô ráo thoáng mát
- Thiết bị y tế phải được tiệt khuẩn và làm sạch trước và ngay sau khi sử dụng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Đình Duy

