

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: **Huyết áp kế đồng hồ**

Mã hàng: CK-110; CK-111; CK-112; CK-113; CK-131; CK-131A;
CK-133; CK-132C; CK-141; CK-141A; CK-142; CK-143;
CK-145; CK-145A; CK-146A

Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng

Địa chỉ: P403 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 024.35765479

Cách đo huyết áp với Huyết áp kế đồng hồ Spirit

- Người sử dụng cần phải mặc áo quần thoải mái, hít thở sâu và thư giãn.
- Ngồi hoặc nằm thoải mái. Đặt cánh tay lên bàn và ngang với tim.
- Đặt dải quấn xung quanh cánh tay một cách cẩn thận và gọn gàng. Vòng bít quấn không quá lỏng cũng không quá chặt.
- Đặt mặt ống nghe dưới vòng bít, ngoài rìa cánh tay. Sử dụng chuông ống nghe kết hợp để phát hiện rõ ràng âm thanh thấp nhất.
- Bơm khí vòng bít. Chắc chắn rằng van điều chỉnh khí được đóng.
- Mở van điều chỉnh khí để xả khí hoặc giải phóng áp lực vòng bít dần dần với tốc độ 22 - 3mmHg/giây.
- Ghi lại âm thanh ở mức âm vực thấp, phạm vi như huyết áp tâm thu và sự biến mất của âm thanh này.
- Dựa trên kết quả đo hoặc sự hoàn tất, mở van điều chỉnh không khí để xả hết toàn bộ khí còn lại và áp lực trong túi hơi.
- Tháo vòng bít ra khỏi cánh tay.

Lưu ý: - Không tháo rời thiết bị và cũng không được ngâm chùi ống, màng lọc trừ khi thủy ngân hoàn toàn được khoá kĩ, vì thủy ngân rất độc hại.

- Luôn luôn mang vật bảo hộ (găng tay và kính) khi lau chùi và sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp thủy ngân bị đổ, làm sạch nó kịp thời, mang thiết bị đến kỹ thuật viên có trình độ để sửa chữa.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Đỗ Hữu Ngươn