



Tên công ty: **CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN**

Địa chỉ: 2/1/12 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MẪU NHÃN DỰ KIẾN CỦA SẢN PHẨM CHẤT ĐÈN PHẪU THUẬT

ĐÈN PHẪU THUẬT HAI NHÁNH

Mã sản phẩm: OL-01; TL-01

Số Công bố A:

Công dụng: Dùng trong phẫu thuật ở bệnh viện và các phòng khám, trung tâm y tế, hỗ trợ nhân viên y tế trong quá trình phẫu thuật bằng cách chiếu sáng khu vực của bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Cố định đèn phẫu thuật

Bước 2: Khử trùng tay cầm khử trùng và kiểm tra:

- Không có hư hỏng rõ ràng đối với đèn phẫu thuật.
- Đảm bảo rằng nguồn điện trong phòng phẫu thuật hoạt động bình thường.
- Môi trường nhiệt độ và độ ẩm trong nhà đạt yêu cầu.
- Độ chiếu sáng bình thường của đèn mổ.
- Hệ thống đèn phẫu thuật không xảy ra hiện tượng lệch

Bước 3: Điều chỉnh vị trí của đầu đèn thông qua tay cầm khử trùng:

- Có thể sử dụng tay cầm điều khiển bằng nhựa vô trùng, đã được tiệt trùng để di chuyển đầu đèn đến vị trí đã định và điều chỉnh cường độ ánh sáng, kích thước trường ánh sáng và nhiệt độ màu.

Bước 4: Điều chỉnh độ chiếu sáng của đèn phẫu thuật thông qua bảng điều khiển.

Bảng điều khiển loại cảm biến (tiêu chuẩn) cho phép điều chỉnh:

- Cường độ chiếu sáng nội soi
- Chuyển đổi BẬT / TẮT
- Kích thước ánh sáng Feld (tùy chọn)
- Điều chỉnh nhiệt độ màu (tùy chọn).

Bước 5: Làm sạch, khử trùng đèn phẫu thuật trước và sau ca phẫu thuật.

Bảo quản: Nhiệt độ phòng, nơi khô ráo thoáng mát; Thiết bị y tế phải được tiệt khuẩn và làm sạch trước và ngay sau khi sử dụng

Cảnh báo và thận trọng:

- Vui lòng xác nhận tất cả đường dây điện được kết nối an toàn và đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Kiểm tra công tắc và đảm bảo chúng có thể hoạt động.
- Thiết bị liên lạc RF di động hoặc di động sẽ ảnh hưởng đến thiết bị điện tử y tế.
- Thông tin chi tiết vui lòng xem hướng dẫn sử dụng đi kèm.

Xuất xứ:

- **Hãng nước sản xuất và chủ sở hữu:** INFIMED Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa

Địa chỉ: ul. Kabaty 1, 34-300 Zywiec, Poland

- **Nhập khẩu và phân phối bởi:** CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN

Địa chỉ: 2/1/12 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày sản xuất, HSD, Số lô sản xuất: in trên bao bì