



Hướng Dẫn Sử Dụng Cuvet Máy Xét Nghiệm Đông Máu Tự Động

Tên sản phẩm

REF: SF-VC1-1000, Auto Coagulation Analyzer Cuvette

Đây là sản phẩm loại sử dụng một lần.

Các sai lệch phân tích do sử dụng nhiều lần không được bảo hành trong thời gian bảo hành của sản phẩm này

Thành phần của sản phẩm này: hơn 1000 cuvet có sẵn bi mỗi cuộn, 6 cuộn mỗi hộp, sau khi lắp vào máy, sử dụng 1000 cuvet, máy sẽ báo thay cuộn cuvet mới.

Khuyến cáo mở bọc cả cuộn ra khi sử dụng.

Không nên sử dụng Cuvet trong thời gian dài sau khi mở bọc để tránh ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm

Cuvette đã sử dụng phải được xử lý theo các quy định có liên quan của địa phương về chất thải nhựa sau khi đã khử nhiễm.

Trong trường hợp kẹt cuvet, vui lòng kiểm tra xem bi thép có nằm nhầm bên trong khu vực nạp cuvet không (máy để bàn).

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Quy trình thay công đo trên máy đo đông máu tự động SF-8050

- Mỗi cuộn cuvet mới luôn bao gồm một hơn 1000 công đo gắn trên một dây phim và được cuộn lại trên một bánh

- Khi máy hiện thông báo hết công đo và yêu cầu thay mới:


- Mở cửa trái của máy (được treo trên chốt, mở bằng cách nâng lên và kéo ra ngoài)
- Lấy cuộn băng công đo đã hết ra bằng cách:
 - Vận nút số ⑤ hai vòng theo chiều kim đồng hồ để rời lỏng cuộn phim công đo ra
 - Bật chốt nhỏ trên nút số ⑤ và kéo trục cuộn phim ra
 - Định vị dây phim và tháo dây ra theo thứ tự của số ⑥, ④, ③.
 - Lấy nắp của số ② ra, và tháo trục băng công đo.
- Lắp cuộn băng công đo mới vào máy:
 - Lấy nắp số ② ra, lắp băng công đo vào sao cho lỗ giữa băng công đo tra vào trục xoay ②.

Cài lại chốt giữ trên trục.


Thận trọng ! Hãy chú ý đến hướng lắp. Hướng quay của băng công đo là theo chiều kim đồng hồ. Thông thường, nhãn hướng ra bên ngoài.

- Lắp lại nắp số ②
- Lắp dây phim theo thứ tự ③, ④, ⑥





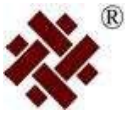

- Xoay số ⑤ ngược chiều kim đồng hồ, không vặn quá chặt.

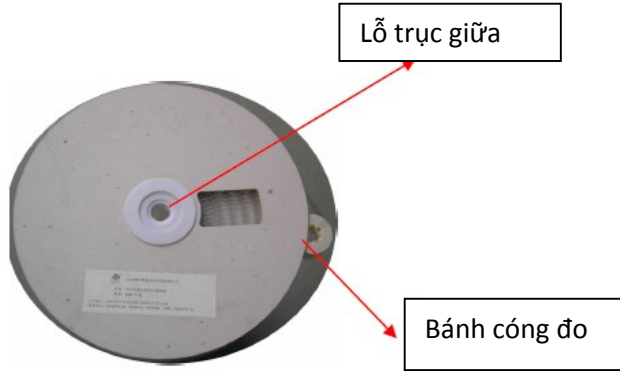

- ① Băng cồng đo
- ② Nắp để ngăn băng cồng đo trượt ra ngoài
- ③ Ròng rọc trên cùng
- ④ Ròng rọc dưới
- ⑤ Nút để xoay cuộn phim
- ⑥ Kẹp nhỏ để ép dây phim
- ⑦ Kẹp nhỏ để tách dây phim
- ⑧ Vị trí ủ đầu tiên

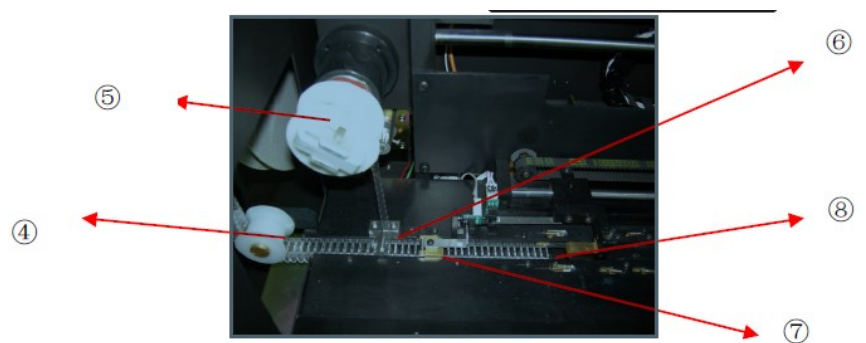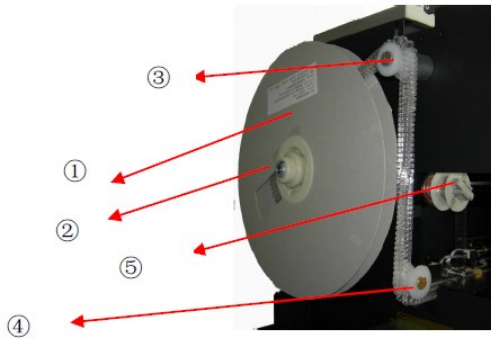

BẢO QUẢN VÀ ỔN ĐỊNH

Auto Coagulation Analyzer Disposable Cuvettes không giới hạn hạn sử dụng, bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Không nên sử dụng các cồng đo khi đã mở hộp quá lâu để tránh ảnh hưởng đến kết quả.

