

NHÃN GÓI



Thành phần tự nhiên

Cát Lành
Gạc răng miệng trẻ em

Chăm sóc răng miệng bé theo cách tự nhiên

- Mềm mại, sạch sẽ & tiện dùng
- Không chứa Fluorid & chất bảo quản

0+ Ages

GẠC ƯỚT ĐÁ TIỆT TRÙNG

THÀNH PHẦN
Gạc mềm thấm ướt dung dịch natri clorid, natri bicarbonat, xytilitol và chiết xuất Cúc La mã.

CÔNG DỤNG
Dùng vệ sinh khoang miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giúp làm sạch miệng, lưỡi, nước, răng, loại bỏ cặn sữa, mảng bám, vi khuẩn, nấm...

CÁCH DÙNG
Rửa sạch tay. Xò gạc vào ngón tay trỏ. Bế trẻ hoặc đặt trẻ nằm trên giường. Nhẹ nhàng lau vòm miệng và bề mặt răng, nước trước. Sau đó lau lưỡi cho trẻ từ phía trong gốc lưỡi ra phía ngoài. Ngày dùng 2 lần, buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Sản xuất bởi: Công ty TNHH Dược phẩm Cát Lành
Số 19, Gamuda Gardens 2.3, Tân Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 02466662424; Hotline: 0914485089
SẢN XUẤT THEO TCCS: ISO 13485:2016

BẢO QUẢN NƠI KHÔ MÁT

NHÃN HỘP
Kích thước: 110 x 60 x 85 mm
Chất liệu: Giấy Ivory 400, cán mờ



Thành phần tự nhiên

Cát Lành
Gạc răng miệng trẻ em

GẠC ƯỚT ĐÁ TIỆT TRÙNG

Chăm sóc răng miệng bé theo cách tự nhiên

- Mềm mại, sạch sẽ & tiện dùng
- Không chứa Fluorid & chất bảo quản

0+ Ages

30 Gạc

Thành phần tự nhiên

Cát Lành
Baby mouth tooth gauzes

Naturally & gentle oral care For baby's gums & teeth

- Soft, Hygienic & Individually packaged
- Preservatives & Fluoride Free

0+ Ages

30 Pcs

Medical Devices ISO 13485:2016


STERILIZED WET GAUZES

THÀNH PHẦN
Gạc mềm thấm ướt dung dịch natri clorid, natri bicarbonat, xytilitol và chiết xuất Cúc La mã (Chamomile extract).


CÔNG DỤNG
Dùng vệ sinh khoang miệng hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giúp làm sạch miệng, lưỡi, nước, răng, loại bỏ cặn sữa, mảng bám, vi khuẩn, nấm và phòng ngừa các bệnh răng miệng như tưa lưỡi, viêm lưỡi, nấm miệng, sâu răng...

CÁCH DÙNG
Rửa sạch tay, Xò gạc vào ngón tay trỏ. Bế trẻ hoặc đặt trẻ nằm trên giường. Nhẹ nhàng lau vòm miệng và bề mặt răng, nước trước. Sau đó lau lưỡi cho trẻ từ phía trong gốc lưỡi ra phía ngoài. Ngày dùng 2 lần, buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Chú ý: Không đưa ngón tay vào sâu trong miệng trẻ vì có thể khiến trẻ bị nôn trớ. Không vệ sinh miệng khi trẻ vừa ăn xong



819 385 114 57 63 61



ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Vệ sinh, khoang miệng theo cách tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả, không chứa BPA, an toàn và không độc hại.
Gạc diệt hình ống xô ngón, kích thước vừa vặn các cơ ngón tay.
Gạc được làm ướt sẵn, tiết kiệm bằng tia gamma, đóng gói riêng lẻ, sạch sẽ và tiện dùng.
Dùng dịch thấm ướt gạc chứa các thành phần hoàn toàn tự nhiên, không chứa chất bảo quản, fluorid và hương liệu tổng hợp, an toàn khi nuốt phải, tác dụng làm sạch khoang miệng hiệu quả, vi ngọt nhẹ dễ chịu, giúp bé dễ dàng hợp tác các kỹ vệ sinh răng miệng.
Gạc có thể tái sử dụng nhiều lần.

Sản xuất bởi: Công ty TNHH Dược phẩm Cát Lành
Số 19, Gamuda Gardens 2.3, P. Tân Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 02466662424; 0914485089 Website: www.catlanh.com.vn
Số lưu hành: 0000000097CBA-HN
SẢN XUẤT THEO TCCS: ISO 13485:2016

BẢO QUẢN NƠI KHÔ MÁT