

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ: Xịt họng keo ong Natupolis

THÀNH PHẦN: Trong 20ml xịt họng keo ong chứa:

Propolis (Keo ong): 350mg, Bromelain: 300mg, Tinh dầu Menthol: 160mg, Tinh dầu hương nhu trắng: 100mg, Nano bạc 500ppm: 287mg, Mật ong, Propylen Glycol, Glycerin, Sucralose, Natri bezoat, nước tinh khiết

CÔNG DỤNG

- Làm dịu nhanh đau họng, ngứa rát họng.
- Giúp giảm các triệu chứng ho do cảm lạnh, cảm cúm, thay đổi thời tiết.
- Phòng viêm nhiễm đường hô hấp trên do virus, vi khuẩn.
- Cải thiện các triệu chứng của nhiễm trùng miệng-họng, sâu răng, hôi miệng .

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Người lớn và trẻ em bị ho, viêm họng, đau, ngứa rát họng, bị các triệu chứng sâu răng, hôi miệng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người lớn và trẻ em trên 1 tuổi: ngày xịt từ 2 – 4 lần.

Phụ nữ có thai, đang cho con bú và trẻ em dưới 1 tuổi: tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng.

Lắc trước khi sử dụng. Đưa đầu vòi phun sương vào khoang miệng.

Với viêm họng, đau họng, ngứa họng: hướng đầu vòi phun sương vào sâu cổ họng.

Ấn nhẹ, dứt khoát để dung dịch đi tới vị trí mong muốn. Ấn từ 2 đến 5 lần mỗi lần xịt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Không sử dụng cho người dị ứng với các sản phẩm từ ong hay phấn hoa
- Ngưng sử dụng sản phẩm nếu xuất hiện các phản ứng dị ứng

LƯU Ý:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HÃY HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng