

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ KHÁM BỆNH KIỂU VALI

### HÃNG SẢN XUẤT: INVIDIA MEDICAL GMBH & CO. KG – ĐỨC

**1. Nguyên tắc:** tất cả các dụng cụ đều phải được sử dụng trong điều kiện vô trùng và được tiệt trùng trong tủ/ thiết bị chuyên dụng hoặc sử dụng quy trình thủ công đặc biệt.

**2. Làm sạch ban đầu:** Làm sạch bề mặt dụng cụ bằng vải mềm, ẩm, không có sợi cứng. Máu, mô, mảnh vỡ tế bào hoặc nước muối phải được lấy ra khỏi dụng cụ ngay sau khi sử dụng (tốt nhất trong vòng 2 giờ). Vị trí khớp nối phải được làm sạch/ khử trùng ở vị trí mở để đảm bảo rằng các khe, rãnh và các thiết bị khóa được làm sạch/ khử trùng. Đối với kim, kìm và dụng cụ ống, cần phải hút và xả chất lỏng khử trùng (nước khử khoáng) nhiều lần và thổi khô bằng không khí đã được lọc, cần thận kiểm tra để không có chất lạ ở bên trong dụng cụ.

### 3. Khử trùng:

- Khử trùng/ Làm sạch bằng tay: Sử dụng xà phòng và nước để tạo dung dịch làm sạch, hoặc sử dụng chất làm sạch chuyên dụng

- Khử trùng/ Làm sạch tự động: Chất khử trùng đã được kiểm nghiệm, tối thiểu 10 phút ở 93 độ C, thiết bị khử trùng thường xuyên được bảo dưỡng ít nhất 1 lần/ ngày

**4. Tiệt trùng hơi:** sấy khô sản phẩm, thời gian khử trùng ( thời gian phơi nhiễm ở nhiệt độ khử trùng ) tối thiểu là 15 phút ở 121 độ C/250 độ F hoặc 5 phút ở 134 độ C/273 độ F)

**5. Đóng gói:** Đóng gói các dụng cụ trong túi tiệt trùng (có niêm phong) hoặc hộp khử trùng có thể tái sử dụng, đảm bảo tính vô trùng được duy trì cho đến khi sử dụng

**6. Lưu trữ:** Dụng cụ phải được lưu trữ trong bao bì khử trùng sau khi khử trùng trong môi trường sạch và khô, đảm bảo các đặc tính hoạt động của dụng cụ không bị tổn hại

Chú ý: Tài liệu này chỉ có giá trị tham khảo nhanh. Để có thể sử dụng thiết bị đúng cách, xin đọc sách hướng dẫn sử dụng bản tiếng Anh được cung cấp cùng với thiết bị.



GIÁM ĐỐC  
K.S Phạm Huỳnh Lon