



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ

VP: Số 116 - Thái Thịnh 1, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ nhà máy: Lô B5C - khu công nghiệp Hapro- xã Lệ Chi - huyện Gia Lâm - Hà Nội.

Tel: 0243.5626781 Fax: 0243.5626782

Email: vanphonganphu@yahoo.com

Website: www.anphumedical.com.vn

GẠC RƠ LƯỠI TRẺ EM (THẢO DƯỢC)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm làm từ sợi polyester dệt thành ống tròn, kích thước xỏ vừa ngón tay, có thấm dung dịch thảo dược đi kèm mục đích làm sạch miệng lưỡi, được đóng trong túi giấy nhôm hàn kín và được tiệt trùng bằng khí E.O.

Có màu trắng

2. Chỉ định

Sản phẩm được dùng để loại trừ các mảng bám, vi khuẩn trên bề mặt lưỡi và trong khoang miệng, hạn chế các bệnh về răng miệng.

3. Cảnh cáo và thận trọng

- Sản phẩm dùng một lần.
- Sản phẩm nên sử dụng ngay sau khi mở bao gói.
- Không cho vào nhà vệ sinh sau khi sử dụng

4. Hướng dẫn sử dụng

- + Rửa tay sạch bằng xà phòng
- + Cho nhẹ ngón tay vào miệng gạc
- + Lau nhẹ nhàng lên nướu, lưỡi, răng và phần bên má

Đối với trẻ đang bị tưa lưỡi: Lau nhẹ nhàng lên lưỡi bé, nên dùng 3 lần/ngày

Đối với trẻ đang mọc răng: Khi trẻ đau nhức khi mọc răng, mẹ có thể đeo gạc và xoa nhẹ nơi nướu đang sưng để giảm cảm giác khó chịu cho bé

Đối với trẻ đã mọc răng chưa biết đánh răng: Nên vệ sinh đều đặn ngày 2 lần: buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ



Đối với người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng: Người chăm sóc đeo gạc và vệ sinh răng, miệng của người lớn. Có thể dùng nhiều miếng gạc cho một lần vệ sinh.

5. Xử lý chung

Không sử dụng sản phẩm đã qua sử dụng hay sản phẩm hết hạn, kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm được tốt.

6. Bảo quản: Bảo quản trong túi tiệt trùng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở



Trần Đình Lễ

