

XỊT HỌNG

HOVYLIX

XUYÊN TÂM LIÊN

THÀNH PHẦN:
Nano bạc Tây Ban Nha 2500 ppm (Nano silver), Chiết xuất Keo ong Italia (Propolis extract), Chiết xuất cúc tím (Echinacea purpurea extract), Chiết xuất xuyên tâm liên (Andrographis paniculata Extract), Chiết xuất côm cháy (Elderberry extract), Tinh dầu Bạc hà (Peppermint essential Oil), Tinh dầu húng chanh (Coleus Leaf Essential oil), Sorbitol, Xylitol, Sucralose, Kalium sorbate, nước tinh khiết vô dũ.
Số ĐKSP: 08/2021/VYT-VESTA
Số ĐKPS:

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng sản phẩm

Số lô:
NSX:
HSD:

Phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TUE MINH
Địa chỉ: Thôn Hoà Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA**
Địa chỉ: Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

XỊT HỌNG HOVYLIX XUYÊN TÂM LIÊN

NANO SILVER

Chiết xuất **XUYÊN TÂM LIÊN KEO ONG ITALIA CÚC TÍM**

Ag⁺

HỖ TRỢ

- GIẢM HO, KHẢN TIẾNG ĐAU RÁT HỌNG
- NGĂN NGỪA VI KHUẨN, VIRUS gây tổn thương miệng, họng
- NGĂN NGỪA CÁC VI KHUẨN gây hôi miệng, nhiệt miệng

LIỀU DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang miệng, mỗi lần xịt 2-4 nhát, Ngày dùng 3-4 lần.
- Trẻ em từ 2-12 tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang miệng, mỗi lần xịt 2-3 nhát, Ngày dùng 3-4 lần.
- Trẻ em từ 06 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang miệng, mỗi lần xịt 1-2 nhát, Ngày dùng 2-3 lần.
- Trẻ em dưới 06 tháng tuổi: Tham khảo ý kiến của Bác sỹ và Dược sỹ trước khi sử dụng (Có thể dùng tăng số lần xịt trong ngày nếu cần thiết)

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người có nguy cơ và người đang bị viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan.
- Người có các biểu hiện cảm cúm như: ho do thay đổi thời tiết, hắt hơi, sổ mũi.
- Người viêm lợi, nhiệt miệng, sâu răng, hôi miệng, chảy máu chân răng.
- Người cần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm lây qua đường miệng.
- Nên xịt hong hằng ngày làm sạch miệng giúp phòng tránh các bệnh lây theo đường hô hấp.
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kì thành phần nào của sản phẩm.
- Không được xịt hay bôi vào mắt.
- Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc bị nhiễm khuẩn trong quá trình sử dụng.

ĐÀO QUẢN: Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

ISO 13485

LO 30ml

HOVYLIX
XUYÊN TÂM LIÊN



XỊT HỌNG

HOVYLIX

XUYÊN TÂM LIÊN

NANO SILVER

HỖ TRỢ

GIẢM HO, KHẢN TIẾNG ĐAU RÁT HỌNG

NGĂN NGỪA VI KHUẨN, VIRUS gây tổn thương miệng, họng

NGĂN NGỪA CÁC VI KHUẨN gây hôi miệng, nhiệt miệng

Ag⁺

Ag⁺

Ag⁺

Ag⁺

Ag⁺



Số lô:
NSX:
HSD:

Phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TUE MINH

Địa chỉ: Thôn Hoà Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA

Địa chỉ: Thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

HOVYLIX
XUYÊN TÂM LIÊN

XỊT HỌNG

Xịt hong HOVYLIX Xuyên tâm liên với thành phần chiết xuất Xuyên Tâm liên, Nano bạc nhập khẩu từ Tây Ban Nha có tác dụng:

- Vệ sinh vùng miệng, họng, giúp làm sạch, hỗ trợ giảm nguy cơ và hỗ trợ giảm các triệu chứng do viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan như: ho do thay đổi thời tiết, đau rát họng, khản tiếng.
- Hỗ trợ ngừa khuẩn, kháng viêm, giúp ngăn ngừa và loại bỏ vi khuẩn, virus gây tổn thương ở miệng, họng, các vi khuẩn gây sâu răng, hôi miệng, nhiệt miệng.
- Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lây theo đường hô hấp như cúm thường, cúm A, H5N1, H1N1, chân tay miệng trẻ em, ...

CÁCH DÙNG:

- Bước 1: Mở nắp đầu van xịt
Bước 2: Lắc mạnh mỗi lần xịt để nano bạc phân tán đều khoang miệng sau khi xịt. Không cần súc lại bằng nước lọc.
Bước 3: Dùng tay nhấn đầu van xịt
- Viêm họng, Viêm amidan, đau họng, ho; Xịt sâu vào trong họng
 - Nhiệt miệng, loét miệng; Xịt thẳng vào vết loét, vết nứt
 - Phòng ngừa sâu răng, hôi miệng, các bệnh lây theo đường hô hấp; Xịt vào khoang miệng và vùng chân răng.

LIỀU DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang miệng, mỗi lần xịt 2-4 nhát, Ngày dùng 3-4 lần.
- Trẻ em từ 2-12 tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang miệng, mỗi lần xịt 2-3 nhát, Ngày dùng 3-4 lần.
- Trẻ em từ 06 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi: Xịt trực tiếp vào khoang miệng, mỗi lần xịt 1-2 nhát, Ngày dùng 2-3 lần.
- Trẻ em dưới 06 tháng tuổi: Tham khảo ý kiến của Bác sỹ và Dược sỹ trước khi sử dụng (Có thể dùng tăng số lần xịt trong ngày nếu cần thiết)

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người có nguy cơ và người đang bị viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan.
- Người có các biểu hiện cảm cúm như: ho do thay đổi thời tiết, hắt hơi, sổ mũi.
- Người viêm lợi, nhiệt miệng, sâu răng, hôi miệng, chảy máu chân răng.
- Người cần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm lây qua đường miệng.
- Nên xịt hong hằng ngày làm sạch miệng giúp phòng tránh các bệnh lây theo đường hô hấp.
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kì thành phần nào của sản phẩm.
- Không được xịt hay bôi vào mắt.
- Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc bị nhiễm khuẩn trong quá trình sử dụng.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Số TCCS: 08/2021/VYT-VESTA

Số ĐKPS:



Điện thoại tư vấn: **0971.648.666**

THÀNH PHẦN:
Nano bạc Tây Ban Nha 2500 ppm (Nano silver), Chiết xuất Keo ong Italia (Propolis extract), Chiết xuất cúc tím (Echinacea purpurea extract), Chiết xuất xuyên tâm liên (Andrographis paniculata Extract), Chiết xuất côm cháy (Elderberry extract), Tinh dầu Bạc hà (Peppermint essential Oil), Tinh dầu húng chanh (Coleus Leaf Essential oil), Sorbitol, Xylitol, Sucralose, Kalium sorbate, nước tinh khiết vô dũ.

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng sản phẩm

mã vạch

LO 30ml