



Trần Đình Khăng

Gạc rơ lưỡi thảo dược Babi Moon được cấu thành từ 100% sợi Polyester có tẩm sẵn dung dịch làm sạch.

Gạc dạng ống kích thước phù hợp với ngón tay của người trưởng thành, chất liệu mềm mại không gây đau, không để lại xơ vùi và gây khó chịu cho bé khi sử dụng. Mỗi tấm gạc được diệt trùng 2 lần, đóng gói đóng thành từ túi riêng đảm bảo tình trạng vô khuẩn và hiện dùng.



Thành phần:

- (1) **Xylitol tự nhiên:** Giúp ngăn ngừa mảng bám, còn tác dụng trên bề mặt lưỡi, khoang miệng bé sau mỗi lần bú mẹ. Giúp chống sâu răng khi bé bắt đầu mọc răng, giúp răng chắc khỏe hơn.
- (2) **Tinh chất trẻ xanh:** Giúp hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám, cặn sữa trong khoang miệng của trẻ. Phòng chống sâu răng trong các trường hợp trẻ bắt đầu mọc răng.
- (3) **Natri bicarbonate (NaHCO3):** Hoạt tính diệt khuẩn và kháng nấm hiệu quả, phòng tưa lưỡi, nấm lưỡi.
- (4) **NaCl:** Làm sạch, sát khuẩn, chống viêm.

Công dụng:

- Dùng hàng ngày để vệ sinh khoang miệng cho trẻ từ sơ sinh. Giúp làm sạch lưỡi, loại bỏ các mảng bám, cặn sữa, vi khuẩn, nấm... bám trên bề mặt lưỡi và trong khoang miệng.
- Hạn chế các bệnh về răng miệng cho trẻ (thôi miêng, viêm nướu, tưa lưỡi, nấm lưỡi...)
- Giúp nướu khỏe trong thời kỳ trẻ mọc răng, phòng chống sâu răng.

Phân phối bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND**
Địa chỉ: Số 12, ngách 23, Ngõ 214 phố Nguyễn Hiền, Phường Hồ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại: 02432191612

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ có chế độ ăn sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm, trẻ có nguy cơ nấm lưỡi, tưa lưỡi.
- Trẻ đang trong thời kỳ mọc răng hoặc đã mọc răng nhưng chưa biết vệ sinh miệng và đánh răng hàng ngày.
- Người già ốm bệnh không thể tự vệ sinh răng miệng.

Cách dùng:

- Rửa sạch tay bằng xà phòng và lau khô.
- Luồn đầu ngón tay vào miệng gạc.
- Đặt nhẹ nhàng từ 2 bên môi sau đó đến các vùng khác: trên vòm miệng và bề mặt lưỡi của bé.
- Lưu ý: Mỗi miếng gạc chỉ sử dụng 01 lần.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em.
- Tránh lửa và nhiệt độ cao.

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TBYT - AN PHÚ**
Địa chỉ: Lô B5 khu CN Hapro - Lê Chi - Huyện Gia Lâm, Hà Nội



Babi moon
GẠC RƠ LƯỠI THẢO DƯỢC

Babi moon
GẠC RƠ LƯỠI THẢO DƯỢC



Babi moon
GẠC RƠ LƯỠI THẢO DƯỢC



30 Gói!

Babi moon
GẠC RƠ LƯỠI THẢO DƯỢC



Phụ gia gồm gồm các thành phần không thể tự vệ sinh răng miệng. Ở sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm, trẻ có nguy cơ nấm lưỡi, tưa lưỡi. Trẻ đang mọc răng hoặc đã mọc răng nhưng chưa biết vệ sinh miệng và đánh răng hàng ngày. Người già ốm bệnh không thể tự vệ sinh răng miệng.

Babi moon
GẠC RƠ LƯỠI THẢO DƯỢC



MEDSTAND