

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# Gel bôi trơn JIKAGEL

Personal lubricant



**JIKAGEL Personal Lubricant** được thiết kế gần giống chất nhờn tự nhiên của cơ thể, với chất gel không màu thân nước, mềm mịn, trơn mượt, dễ bôi và dễ rửa với nước, không gây bất kỳ tổn thương nào. Sản phẩm phù hợp cho cả nam và nữ, mang lại cảm giác thăng hoa cho bạn.

### Thành phần

Aqua, Glycerin, Propylen glycol, Gluconolactone, Hydroxyethylcellulose, Lactic acid, Menthol, Chlorhexidine digluconate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hyaluronic acid, Sodium hydroxide 10%.

### Công dụng

- Giúp dưỡng ẩm và làm mịn màng vùng kín của nam và nữ, đặc biệt là nữ giới bị chứng khô âm đạo.
- Giúp bổ sung độ ẩm, bôi trơn, giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu khi quan hệ, khiến bạn thoải mái và tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục

### Cách dùng

Rửa tay trước khi sử dụng. Bôi trực tiếp một lượng vừa đủ vào vùng kín của nam và nữ, hoặc bao cao su, cốc nguyệt san, đồ chơi tình dục.

### Chú ý

- An toàn khi sử dụng với bao cao su, đồ chơi tình dục.
- Không sử dụng nếu bạn bị, hoặc nghĩ rằng bạn có thể bị nhiễm khuẩn vùng kín.
- Không sử dụng nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Sử dụng chất bôi trơn gốc nước có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tinh trùng. Nếu bạn đang cố gắng thụ thai, hãy tìm lời khuyên của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Chất bôi trơn này không phải là một biện pháp tránh thai và không chứa các thành phần diệt tinh trùng.
- Nếu bị kích ứng, ngưng sử dụng ngay lập tức và rửa bằng nước sạch. Nếu vẫn tiếp tục kích ứng, hãy tìm lời khuyên của bác sĩ, dược sĩ.
- Nếu bạn hay đối tác đang có thai, hãy tìm lời khuyên của bác sĩ, dược sĩ.
- Tránh tiếp xúc với mắt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

### Bảo quản

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS

Số công bố:



SẢN PHẨM  
DÀNH CHO  
NAM & NỮ



Cơ sở phân phối:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC**

Lô B10/D6 - KĐT Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng  
Quận Cầu Giấy - Hà Nội



Cơ sở sản xuất:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN**

Đường YP6 - KCN Yên Phong - Xã Đông Phong  
Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh